

吸引栓 MD-493

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1. 構成

・ 吸引栓 MD-493

2. 各部の名称

★は、使用中に間接的に生体粘膜などに触れる部分である。

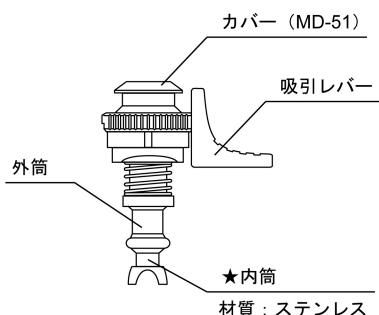

3. 仕様

全長 : 41.9mm
外径 : Φ17.4mm (カバー部)

作動・動作原理

本品の吸引レバーを下に押し下げることにより吸引する。また、カバーに鉗子栓を取り付けることで、シリンジによる送液、処置具の挿入ができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社製の喉頭ファイバースコープおよび OLYMPUS ENF TYPE T3 の吸引シリンダーに取り付けて、吸引制御、薬液注入、処置具の挿入を行うことを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1. 消毒、滅菌

決められた方法で消毒、滅菌する。

2. 準備

吸引栓と新品の鉗子栓を準備する。

3. 内視鏡への取り付け

- (1) 吸引栓の本体を吸引レバーが吸引口金と平行になるようにして、吸引シリンダー開口部に入れる。
- (2) カバーの白線と吸引シリンダーの白点が合うようにして、カバーを止まるまで押し込む。
- (3) クリック感があるまで吸引栓を回転させる。
- (4) 鉗子栓を吸引栓のカバーにかぶせるように上方より、押し付けて付ける。

4. 手入れと保管

使用後、消毒、滅菌してから保管する。

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』を参照すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 一般的事項

- (1) 本製品は、出荷前に洗浄、消毒、滅菌されていないため、使用前に洗浄、消毒、滅菌を行うこと。洗浄、消毒、滅菌せずに使用すると感染するおそれがある。

不具合

その他の不具合

洗浄・消毒・滅菌不良

有害事象

その他の有害事象

患者・術者などの感染

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、本製品の『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌および保管すること。

耐用期間

本製品は消耗品（修理不可能）である。本製品の『取扱説明書』に従って点検を実施し、異常があれば新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄、消毒、滅菌方法

1. 『取扱説明書』に記載の、洗浄、消毒、滅菌に使用できる薬剤を使用すること。それ以外の薬剤については、オリンパスまで問い合わせること。
2. 本製品の外表面および内面に消毒液が残らないように、清潔な水で十分にすすぐこと。
3. 本添付文書および本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質であるプリオンを消失または不活化することはできない。クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、その患者専用の機器として使用するか、使用後適切な方法で廃棄すること。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応は、種々のガイドラインに従うこと。
4. 洗浄時に洗浄液を過度に泡立たせないようにすること。
5. 消毒液中では、本製品の表面に付いた気泡を完全に除去すること。

使用者による保守点検事項

長期の使用により、機器の劣化は避けられない。特に使用薬剤による影響や経時変化によっても劣化する。本添付文書や本製品の『取扱説明書』に示す使用前点検を実施すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

取扱説明書を必ずご参照ください。