

機械器具 25 医療用鏡 一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ JMDN コード 37090010

WA00387A ゴムキャップ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成

WA00387A ゴムキャップ


**注) 本製品は再使用禁止である。

2.各部の名称

★は、使用中生体粘液等に触れる部分である。

★本体

材質：
シリコンゴム

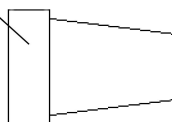

**3.仕様

全長 : 14mm

作動・動作原理

内視鏡に取り付けた処置具口金に本製品を取り付け、内視鏡処置具の挿入を可能にし、かつ灌流液などの漏出を防止する。

**【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の内視鏡の処置具口金に取り付け、処置具の挿入を可能にし、かつ灌流液などの漏出を防止することを目的とする。

**【使用方法等】

使用方法

1.点検

以下の点検を行う。

- (1)滅菌パックに異常がないこと。
- (2)へこみ、亀裂、曲がり、スリキズなどの異常がないこと。

2.取り付け

内視鏡に接続した処置具口金に本製品を取り付ける。

3.処置具の挿入

内視鏡用処置具を挿入する。

4.廃棄

使用後は適切な方法で廃棄する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の機器または同等品と接続して用いる。

組み合わせ機器	商品記号	販売名	医療機器認証番号
処置具口金	WA00395A	OES Pro 処置用コンパクトウレテロレノスコープ	219ABBZX00034000

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

一般的事項

- 1.本製品を用いた処置は、術野が確保された状態で慎重に行うこと。
- 2.本製品の無菌性を維持するために、できる限り清浄な環境で無埃手袋を用いて開封すること。

**不具合

その他の不具合

破損、変形

**有害事象

その他の有害事象

感染、組織の損傷

**【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）による）。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

オリンパス ウィンター アンド イベ社

OLYMPUS WINTER & IBE GMBH

国名：ドイツ連邦共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。