

サーコンシリコンシール

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

CS-W7S サーコンシリコンシール (白) 2-7Fr 用

**注) 本製品は再使用禁止である。

2.各部の名称

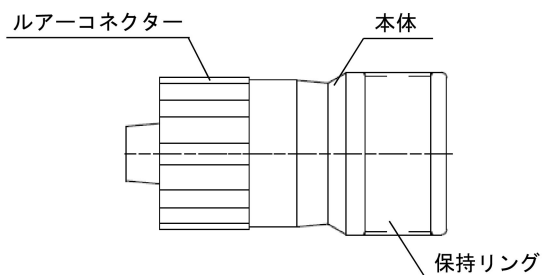

**注) 本製品は使用中に体腔内の粘膜などに接触する部品はない。

**3.仕様

全長 : 24.4mm

作動・動作原理

内視鏡または処置具口金に本製品を取り付け、内視鏡処置具の挿入を可能にし、かつ灌流液などの漏出を防止する。

**【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の内視鏡又は処置具口金に取り付け、処置具の挿入を可能にし、かつ灌流液などの漏出を防止することを目的とする。

**【使用方法等】

使用方法

1.点検

以下の点検を行う。

- (1)滅菌パックに異常がないこと。
- (2)へこみ、スリキズなどの異常がないこと。

2.取り付け

ルアーコネクターを内視鏡の処置具挿入口または内視鏡に取り付けた処置具口金に取り付ける。

3.処置具の挿入

内視鏡用処置具を挿入する。

4.廃棄

使用後は適切な方法で廃棄する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、最大径が 2Fr 以上 7Fr 以下の内視鏡用処置具と組み合わせて使用すること。

使用方法等に関連する使用上の注意

常温、清潔で、乾燥した換気のよい状態で保管すること。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

一般的事項

- 1.本製品を用いた処置は、術野が確保された状態で慎重に行うこと。
- 2.本製品の無菌性を維持するために、できる限り清浄な環境で無埃手袋を用いて開封すること。

**不具合

その他の不具合

破損、変形

**有害事象

その他の有害事象

感染、組織の損傷

**【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）による）。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

ジャイラス・エーシーエムアイ社
Gyrus ACMI, Inc.
国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。