

TB/SB フットスイッチ

【禁忌・禁止】

使用方法

本製品を強力な電磁波を浴びる場所（マイクロ波治療器、短波治療器、MRI、無線機、携帯電話などの付近）で使用しないこと。
〔誤作動を招くおそれがある。〕

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成


本製品は以下のものから構成される。

- ・ソニックビート用フットスイッチ MAJ-1869
- ・サンダービート用フットスイッチ MAJ-1870


2.各部の名称

外観図、主要部分の名称

- ・ソニックビート用フットスイッチ MAJ-1869

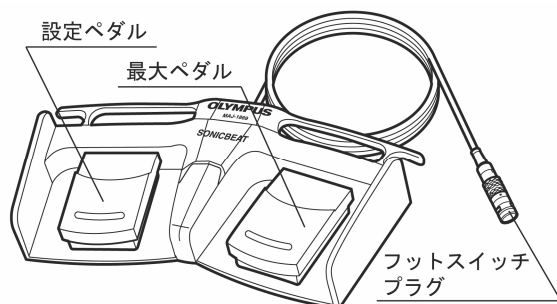

- ・サンダービート用フットスイッチ MAJ-1870

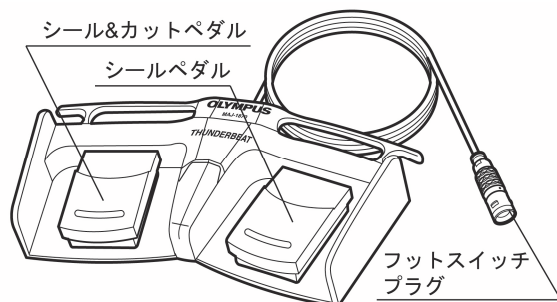

※ 単品で製造販売する場合がある。

3.仕様

(1)ソニックビート用フットスイッチ MAJ-1869

- ・耐水性：保護等級 IPX8
- ・寸法：幅 346×高さ 64×奥行き 186mm
- ・質量：2.3kg
- ・コード長：4m

(2)サンダービート用フットスイッチ MAJ-1870

- ・耐水性：保護等級 IPX8
- ・寸法：幅 346×高さ 64×奥行き 186mm
- ・質量：2.3kg
- ・コード長：4m

作動・動作原理

本製品は超音波手術器と接続することで、ペダルを踏むと、超音波手術器が出力する。一方、ペダルを離すと、超音波手術器の出力が停止する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の超音波手術器に接続し、超音波手術器の出力を制御することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1.設置・接続

本製品を超音波手術器に接続する。

2.使用前点検

本製品を接続した超音波手術器の『取扱説明書』に従って点検を行う。

3.処置

術内容に応じて本製品のペダルを踏んで、出力を行う。

4.処置後の操作

本製品を超音波手術器からはずす。

5.手入れ・保管

- (1)消毒用エタノールで湿らせたガーゼやブラシを用いて表面を消毒する。なお、血液や汚物などの付着がある場合は、中性洗剤を浸したガーゼで汚れをふき取る。
- (2)高温・高湿、水の掛かる場所を避け、直射日光、紫外線などを浴びない場所に保管する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の超音波手術器と接続して用いる。

販売名	医療機器承認番号
サージカル ティッシュ マネージメント システム	22500BZX00335000
超音波バイポーラ手術装置 USG-410	30200BZX00058000

**ソニックビート用フットスイッチ MAJ-1869 を超音波バイポーラ手術装置 USG-410 に接続する際には、以下の電気手術器用ケーブル及びスイッチと接続して用いる。

販売名	医療機器届出番号
ソニックビートフットスイッチコネクター MAJ-2412	13B1X00277000667

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

本製品のフットスイッチプラグは、確実に当社指定の超音波手術器に接続すること。不確実な接続の場合、機能が発揮できないおそれがある。

不具合

その他の不具合

機器の破損、作動不良、出力不良

有害事象

その他の有害事象

出血、穿孔、熱傷、やけど、感電

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

本製品を接続する超音波手術器の『取扱説明書』の「手入れ」、「保管」を参照すること。

耐用期間

本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）5 年とする（自己認証（当社データ）による）。なお、本製品を接続する超音波手術器の「取扱説明書」に示す使用前点検及び定期点検を実施し、異常があれば修理または新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

使用前は本製品を接続する超音波手術器の『取扱説明書』に従い点検し、異常が確認された場合は使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）