

DIEGO ELITE 吸引チューブ

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

本添付文書はDIEGO ELITE 吸引チューブの次の構成品目を扱う。

- ・DIEGO ELITE 吸引チューブ TS102SF

2.各部の名称

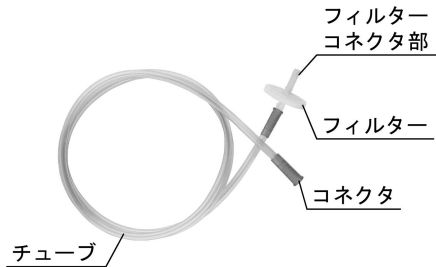

3.仕様

全長：1.94m

作動・動作原理

本製品は、両端がコネクタとなっているプラスチック製のチューブとフィルターから成り、組織片、組織、液体等を吸引する際に、吸引ボトルおよび吸引器と接続する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は吸引器と吸引ボトルを接続するプラスチック製のチューブであり、吸引器により吸引される組織片、組織、液体等を吸引ボトルに回収するために用いることを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1.準備

- (1)DIEGO ELITE 吸引器、マルチデブリッターシステム DIEGO ELITE を準備する。
- (2)DIEGO ELITE 吸引チューブのフィルターコネクタ部をDIEGO ELITE 吸引器のフィルター受けに接続し、コネクタをDIEGO ELITE チューブセットを接続した手術室内の吸引ボトルに接続する。

2.使用方法

マルチデブリッターシステム DIEGO ELITE の本体、DIEGO ELITE コンソールの電源ボタンを押して、吸引ポンプの電源を入れ、吸引を行う。

3.手入れと保管

- (1)マルチデブリッターシステム DIEGO ELITE の本体、DIEGO ELITE コンソールの電源ボタンを押して本体の電源を「OFF」にする。
- (2)吸引チューブを取りはずす。吸引チューブは汚れが著しい場合は交換する。
- (3)吸引チューブの外表面を消毒用エタノールで消毒する。

詳細は、『DIEGO ELITE 取扱説明書』の「第5章 使用法」を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の機器または同等品と接続して用いる。

組み合わせ機器	商品記号	販売名	医療機器認証番号
吸引器	MDSM110V	DIEGO ELITE 吸引システム	226ABBZX00031000
吸引システム	MDCONS100	マルチデブリッターシステム DIEGO ELITE	225ABBZX00110000

使用方法等に関連する使用上の注意

吸引チューブが吸引器および吸引ボトルに正しく確実に接続されていることを確認すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

- 1.吸引チューブは、チューブおよびフィルター内部が汚れた場合、または1日の使用が終了した場合は、廃棄すること。
- 2.吸引チューブ内に詰まりがある場合は、交換すること。

不具合

その他の不具合

破損、部品の脱落、変形、腐食

有害事象

その他の有害事象

感染

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、『DIEGO ELITE 取扱説明書』の「第7章 手入れ、保管および廃棄」を参照すること。

有効期間

本製品は、使用した日ごとに交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

使用前点検において、『DIEGO ELITE 取扱説明書』に記載の点検を実施すること。点検結果により、交換が必要であれば実施すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

外国製造元：

ジャイラス・エーシーエムアイ社

Gyrus ACMI, Inc.

国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。

取扱説明書を必ずご参照ください。