

医療用吸引装置 KV-5

※再使用禁止

(患者チューブ MAJ-103)

**【禁忌・禁止】

再使用禁止 (患者チューブ MAJ-103)

【形状・構造及び原理等】


**構造・構成ユニット

構成

本添付文書は医療用吸引装置 KV-5 の構成部品である。
患者チューブ MAJ-103 について扱う。

材質 : ポリ塩化ビニル
可塑剤 : DEHP (フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)

※再使用禁止である
※単品または任意の組み合わせで製造販売する場合があります。

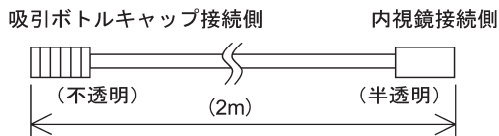

**【使用目的又は効果】

使用目的

本製品 (患者チューブ MAJ-103) は、内視鏡または他の機器に接続し、吸引した血液や体液を吸引ボトルへ導くことを目的とする。


**【使用方法等】

1.点検

製品の外観を点検すること。

2.内視鏡、KV-5 への装着、固定

(1)内視鏡に接続する前に、あらかじめ内視鏡接続側 (端が半透明) の患者チューブを径の細い部分で切断すること。

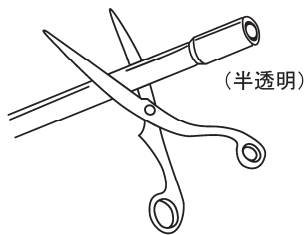

(2)本製品 (患者チューブ MAJ-103) の内視鏡接続側を内視鏡または他の機器と接続する。

(3)本製品 (患者チューブ MAJ-103) の吸引ボトルキャップ接続側を吸引装置に接続した吸引ボトルに接続する。

詳細は KV-5 の『取扱説明書』の「3 使用方法」を参照のこと。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

本製品は、ポリ塩化ビニル製の医療機器であり、可塑剤が溶出する可能性がある。

**不具合

その他の不具合

破損

**有害事象

その他の有害事象

感染

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光の当たらない、清潔で乾燥した場所で、室温保管すること。

有効期間

- 1.本製品はディスポーザブル製品である。
- 2.本製品の使用期限は包装に貼り付けているラベルを参照のこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

外国製造元:

キーメド (メディカル アンド インダストリアル イクイップメント)

KeyMed (Medical & Industrial Equipment)

国名: イギリス/UK

KV-5 の取扱説明書を必ずご参照ください。