

ディスポーザブル電極

再使用禁止

(A22265C コールドナイフ)

*【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。

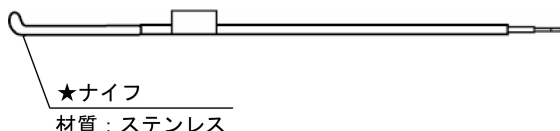

作動・動作原理

切開／切除

本製品は鏡視下で処置を行うためのメスである。鋭利に研磨された刃により、切開、切除ができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は、泌尿器科領域、産婦人科領域において、前立腺、子宮内病変（子宮筋腫、子宮ポリープ）などの切開、切除、凝固、蒸散の処置を行うことを目的とする。

【使用方法等】

**使用方法

挿入、処置

- (1) マンドリンを装着したシースを患部に挿入する。
- (2) シースからマンドリンを引き抜く。
- (3) 本製品と光学視管を装着したハンドルなどをシースに挿入する。
- (4) 内視鏡下で処置を行う。

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』の「6 使用」を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の機器または同等品と接続して用いる。

組み合わせ機器	商品記号	販売名	医療機器認証番号
ハンドル	WA22067A	OES Pro レゼクトスコープ	218ABBZX00057000

**使用方法等に関連する使用上の注意

使用前には、以下の点検を実施すること。
メス先端部の刃先にへこみ、スリキズ、変形、刃こぼれ、磨耗がないこと。

*【使用上の注意】

**重要な基本的注意

一般的事項

1. 本製品は精密な医療機器であり、先端部は鋭利である。本製品を用いた処置は術野が確保された状態で慎重に行うこと。
2. 保護サックをはずす際は、刃先に注意すること。
3. 感電ややけどの原因になるおそれがあるため、本製品を使用する際に、ハンドルをAコードに接続しないこと。

**不具合

その他の不具合

へこみ、スリキズ、変形、刃こぼれ、磨耗

**有害事象

その他の有害事象

感染、穿孔、出血、やけど、感電

***【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

オリンパス ウィンター アンド イベ社
OLYMPUS WINTER & IBE GMBH
国名：ドイツ連邦共和国

本製品の取扱説明書およびシステムガイド内視鏡下手術を必ず参照してください。

本製品の取扱説明書およびシステムガイド内視鏡下手術を必ず参照してください。