

ルナーパック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 収納袋は再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は吸引瓶装置と収納袋とで構成されている



2. 構成

- ・吸引瓶 (重さ8.6kg、高さ63cm)
- ・収納袋 (材質：ポリエチレン)

型番	チューブ (mm)		容量 (mL)
	内径	外径	
1 型	6	8	300
			2,000
			3,000
2 型	8	11	2,000
			3,000

【使用目的又は効果】

体液の回収のため吸引器とともに使用するキャニスタをいう。本品は単回使用である。収納袋はプラスチック製で、折り畳んだ状態で提供され、使用前に組み立てるよう個別にパックされている。適用される環境法規に従って様々な方法で廃棄する。汚染防止のための逆止弁がついている。

【使用方法等】

1. 使用前 (操作準備)

- ①ハンガーの吊り下げ金具に収納袋をかけ吸引瓶のゴム枠内の設置場所にセットし、収納袋のチューブと一方コック (Y字コック) と排液吸引チューブをそれぞれ接続する。
- ②吸引瓶装置のゴム蓋をしめ、真空用吸引チューブを吸引装置につなぎ瓶内を真空にする。

2. 使用中

- ①吸引調整バルブで吸引力を調整する。

3. 使用後

- ①収納袋を取り外し危険物として処理する。
- ②吸引瓶や一方コック (Y字コック) が汚れていたら清掃する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①ルナーパックは取扱い操作を十分に熟知してから使用して下さい。
- ②逆流する恐れがあるので、収納袋上に表記されている赤色線危険ライン以上は絶対に排液を吸引しないで下さい。
- ③吸引瓶装置を移動持ち運ぶ時は必ず吸引瓶を持って下さい。ゴム枠のみ持ち上げるとガラス瓶がはずれる事があり危険です。

2. 重要な基本的注意

- ①包装が破損、汚損の場合や製品の外観不良が認められた場合は使用しないで下さい。
- ②刃物など鋭利な器具に触れると収納袋が破れたり穴があくことがあります。

3. 相互作用

- ①薬品、溶剤等によっては膨潤したり浸透したりする場合がありますので確認の上、ご使用下さい。

【保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光・高温多湿を避け、水濡れに注意して、常温 (15℃～30℃) ・常湿の室内に保管すること。また、塩分、イオン分などを含む空気などにより悪影響の生ずる恐れのない、衛生的な保管場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オカダ医材株式会社

東京都文京区湯島2-17-5

TEL. 03-3813-9631

製造業者：プラス医科工業株式会社