

機械器具 29 電気手術器  
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

## チップクリーナー

### 再使用禁止

#### 【警告】


1. 本品を使用する前に、添付文書を全て熟読すること
2. 本品に破損、欠損等の異常がある場合には使用しないこと
3. 使用中もその有無を確認し、万一、本品または破損部が体内に脱落した場合、すぐに回収すること

#### 【禁忌・禁止】

1. 本書の【使用目的、効能または効果】に記載されている用途以外への適用禁止
2. 再使用禁止、再滅菌禁止
3. 電極の先端部に銀チップのついた器具およびコーティングが施されたものは、剥がれるおそれがあるため、使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状及び寸法（単位 mm）

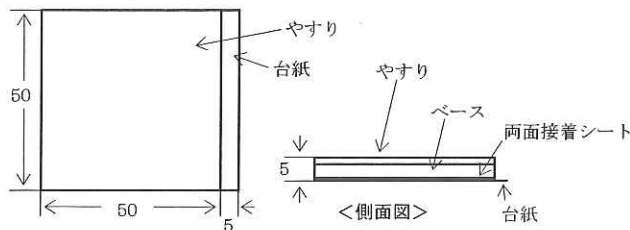

重さ：5g（袋入重量）

#### 【使用目的、効能又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等を除去を目的とした、単回使用のクリーナー。

#### 【品目仕様等】

1. 滅菌時の温度条件：40～60℃
2. 滅菌時の湿度条件：40～60%RH

#### 【操作方法又は使用方法等】

1. 汚染に注意して包装の片端の剥がし、本品を取り出す。
2. 台紙を剥がし、ドレープやメーヨー台などの適当な位置にベースの接着面を貼付け、固定する。
3. 電気メスの電極面およびバイポーラピンセットの先を、やすり面にこするか、あるいは本品にてはさみながら、炭化物などを除去する。
4. 電気メスの電極面およびバイポーラピンセットの先をガーゼでぬぐい、きれいにする。

#### 【使用上の注意】

1. 滅菌品につき、単一の患者に一回限りに使用し、再使用をしないこと。
2. 包装に損傷が認められた時は使用しないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

直射日光・高温多湿を避け、水濡れに注意して、常温・常湿の室内に保管すること。また、衛生的な保管場所に保管すること。

##### 2. 使用期限

箱及び包装袋に記載。

#### 【包装】

1 枚／袋、40 袋／箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業：オカダ医材株式会社

東京都文京区湯島 2 丁目 17 番 5 号

TEL：03-3813-9631

製造業：GuanZhou FuZeLong Hygiene Material Co., Ltd.

グアンジョウ フーゼロング ハイジーン マテリアル  
中国