

機械器具 7 6 医療用吸入器
一般医療機器 耳鼻咽喉科用ネブライザ 70451000

プラスチックネブライザー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

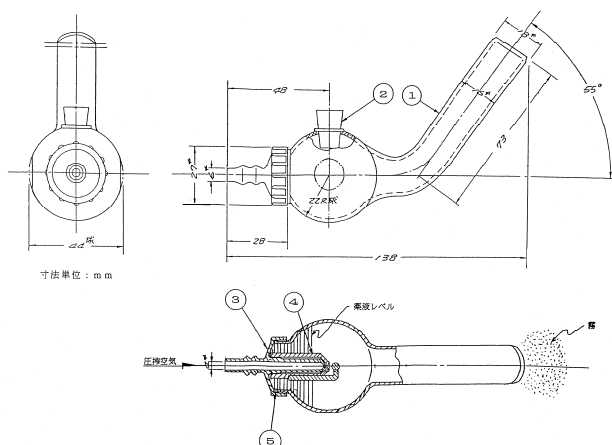

重量：15 グラム

2. 各部の名称と体内に注入される薬液に接する部位の組成

照番	名 称	薬液に接する部位の組成
①	薬液チャンバー	ポリカーボネート
②	シリコン栓	シリコンゴム
③	送気キャップ	ポリプロピレン又はポリエチレン
④	ノズル	ポリプロピレン又はポリエチレン
⑤	Oリング	シリコンゴム


3. 動作原理

本品の薬液チャンバーに貯留した水又は薬液を接続した施設の圧縮空気により霧吹き原理によって霧化し、それを患者へ噴霧して吸入療法に利用する。

【使用目的又は効果】

患者に吸入させるため、エアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置をいう。

【使用方法等】

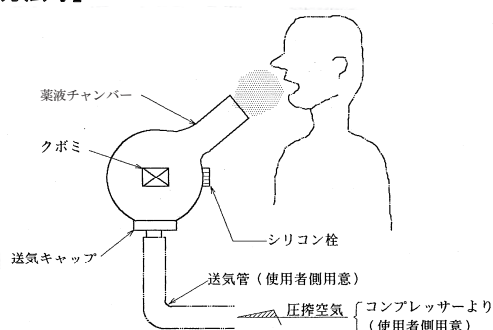

1. 本品を滅菌袋より取り出し、施設の圧縮空気へ接続する。
2. クボミ部を持ちシリコン栓②を外してここより水又は薬液を注入する。
3. 圧搾空気を本品内へ送気する。
[薬液チャンバー内の液が霧化されて霧が発生する]
4. 霧化状態が良好（霧状の様な分布）であることを目視で確認後患者へ使用する。

【使用上の注意】

1. 接続されている薬液チャンバーと送気キャップは外さないこと。
2. 作動源のコンプレッサーからの送気圧は 2 ～ 3 kg/cm² の範囲内とすること。
3. 水又は薬液の注入は必ず所定の場所（シリコン栓を外して）より行うこと。
4. 水又は薬液の注入量は 12 mL を限度としそれ以上入れないこと。
5. 使用時における水又は薬液の液面は床面に対して水平状態であること。
6. 本品は滅菌済み医療機器であるので、1 回限りの使用のみであり、再使用はできない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管条件：常温・常湿で 直接日光に当てないこと。
2. 有効期間：包装箱に記載。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オカダ医材株式会社
東京都文京区湯島 2-17-5
TEL. 03-3813-9631