

オムロン電子体温計 MC-672L


【禁忌・禁止】

(電子体温計を適正にご使用いただくための注意事項です。)

- 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
- * [自己診断は、病気が悪化する原因になります。]
- * 人の体温測定以外に使用しないでください。
- * [動物などを無理に測ろうとすると、暴れてけがをする原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

* 1. 形状

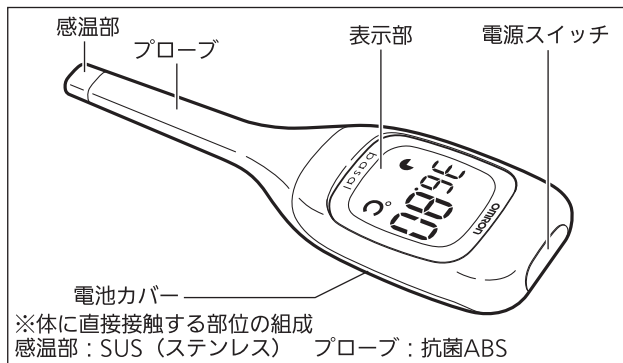

* 2. 構成

標準付属品

収納ケース	1個
お試し用電池(リチウム電池CR2016)	1個
プローブリング	3個
基礎体温表	1枚
取扱説明書(品質保証書付き)	1冊

* 3. 動作原理

本製品は、サーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出し、測定開始から30秒後に予測値を表示し、表示終了後、実測値の最高温度を0.01℃単位で表示する電子体温計である。

測定中は、測定開始から30秒後に予測測定が終了した事を知らせるブザーが鳴る。測定をそのまま続けると、予測測定終了後から約5分後に実測測定終了のブザーが鳴る。

4. 本体寸法及び重量

外形寸法	: 34(幅)×125.2(長さ)×15(厚さ)mm
質 量	: 約27g(電池含む)

5. 電気的定格

電 源	: リチウム電池CR2016(DC3V)
電撃保護	: 内部電源機器 B形装着部
消費電力	: 0.02W

* 6. 性能及び安全性に関する規格等

- 最高温度保持機能 : 実測した最高温度値を保持し一定時間表示する
- デジタル表示 : 実測した体温をデジタル表示する
- 最大許容誤差 : 婦人用 32.00~34.99℃の時 ±0.1℃
35.00~38.00℃の時 ±0.05℃
38.01~42.00℃の時 ±0.1℃
※標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合
- 電源電圧 : JIS T 1140:2014に適合
- 防 浸 : JIS T 1140:2014に適合
- 測温範囲 : 婦人用 32.00~42.00℃
- 最小表示単位 : 婦人用 0.01℃
- 測定範囲外告知 : 32.00℃未満のとき「L」を表示、42.00℃を超えると「H」を表示
- 感温部 : サーミスタ
- 測定方式 : 予測・実測(ピークホールド方式)
- 体温表示 : デジタル表示4桁+℃表示、0.01℃毎
- 使用環境周囲温度 : +10~+40℃ 相対湿度:30~85%RH

※試験はJIS T 1140:2014による

**

* 【使用目的又は効果】

本製品は、サーミスタ式の電子体温計です。体温計の感温部を舌下に接触させて、人の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示します。婦人用、口中専用。

* 【使用方法等】

- 電源スイッチを押して電源を入れます。
- 表示部が「検温準備完了表示」になっていることを確認します。
- 感温部を舌下に挿入し、密着させます。
- 予測検温を終了するまで、本体を保持します。
- 予測検温終了のブザー音で、予測検温値を確認します。
- 予測検温のみの場合は、電源スイッチを2秒押して電源を切ります。実測検温の場合はそのまま検温を続けます。
- 実測検温開始から約5分で測定が終了しブザー音が鳴ります。
- 実測検温値を確認し、電源スイッチを2秒押して電源を切ります。

* 詳細については取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

- 口中以外で検温しないでください。
- 連続して検温しないでください。
- 検温中、舌下部において、感温部に密着させるように固定し、空隙はつくらないようにしてください。また、大幅に動かさないでください。
- 電池の電圧が低下すると電池マークが表示されますので電池を取り替えてください。
- 起床直後、床の中で検温してください。
- 飲食後、行動開始後は、比較的激しく体温が上昇しますので、検温は控えてください。
- 感温部およびプローブは防浸ですが、表示部は防浸ではありません。本体を水につけないでください。
- 感温部を強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本体を噛まないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけのご使用はさけてください。
- 周囲温度は10~40℃の範囲で使用してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

次のような環境に保管してください。

保管環境周囲温度: -20~+60℃

相対湿度: 10~95%RH

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかるところ。
- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、重圧、衝撃(運搬時を含む)のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

2. 耐用期間

* 標準的な使用期間: 5年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- 故障した場合は勝手に修理、分解せず、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 勝手に改造しないでください。
- 本製品に水や化学薬品をかけないでください。
- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかたく絞って拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: オムロンヘルスケア株式会社

電話: 0120-30-6606

(オムロン お客様サービスセンター)

取扱説明書を必ずご参照下さい。