

オムロン電子体温計 けんおんくん MC-612


【禁忌・禁止】

(電子体温計を適正にご使用いただくための注意事項です。)

- 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
- 人の体温測定以外に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 主要部の形状と名称

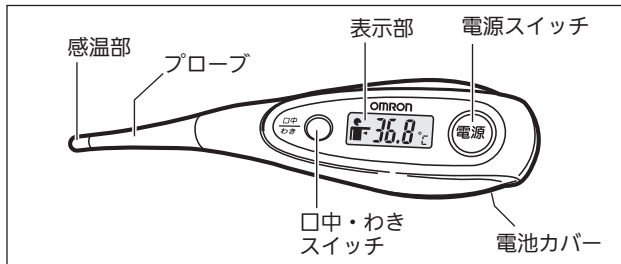

標準付属品

収納ケース	1個
お試用電池(リチウム電池CR2032)	1個
取扱説明書(品質保証書付き)	1部

2. 本体寸法及び重量

外形寸法: 34.6(幅)×149(高さ)×38(奥行き)mm
質 量: 約35 g(電池含む)

3. 電気的定格

電 源: リチウム電池CR2032(DC3V)
電撃保護: 内部電源機器B形装着部

4. 作動・動作原理

体温計先端のセンサ部に2つの温度センサを内蔵しており、わきなどの体表面温度と2つの温度センサの差で流れ込む熱流を測定し、熱伝導方程式から深部温度を算出する。

EMC適合

本製品はEMC規格IEC 60601-1-2:2001に適合しています。

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、サーミスタ式の電子体温計です。体温計の感温部をわき(又は舌下)に接触させて、人の体温を測定し、最高温度を保持してデジタル表示します。わき、口中用。

消費電力	: 0.01 W
感温部	: サーミスタ
測定方式	: 予測・実測(ピークホールド方式)
体温表示	: デジタル表示3桁+℃表示、0.1℃毎
測定範囲	: 35.0~42.0℃
使用環境周囲温度	: +10~+40℃ 相対湿度: 30~85%RH
保管環境周囲温度	: -20~+60℃ 相対湿度: 30~95%RH

【品目仕様等】

- 最高温度保持機能: 実測した最高温度値を保持し一定時間表示する
- デジタル表示: 実測した体温をデジタル表示する
- 最大許容誤差: 一般用 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
※標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合
- 電源電圧: JIS T 1140:2005に適合
- 防浸: JIS T 1140:2005に適合
- 測温範囲: 35.0~42.0℃
- 最小表示単位: 一般用0.1℃
- 測定範囲外告知: 35.0℃未満のとき「L」を表示、42.0℃を超えるとき「H」を表示

※試験はJIS T 1140:2005による

【操作方法又は使用方法等】

- 電源スイッチを押して電源を入れます。
- 表示部が「検温準備完了表示」になっていることを確認します。
- 口中・わきスイッチを押して、検温する部位を選択します。

- 感温部を選択した部位にあて、密着させます。
 - 予測検温を終了するまで、本体を保持します。
 - 予測検温終了のブザー音で、予測検温値を確認します。
 - 予測検温のみの場合は、電源スイッチを2秒押して電源を切ります。実測検温の場合はそのまま検温を続けます。
 - 実測検温開始のブザーが鳴ります。
 - 温度上昇が0.075℃/30秒以下になると収束ブザー音が鳴ります。
 - 実測検温開始からわきの場合は約10分、口中の場合は約5分で測定が終了しブザー音が鳴ります。
 - 実測検温値を確認し、電源スイッチを2秒押して電源を切ります。
- 詳細については取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

- わき・口中以外で検温しないでください。
- 連続して検温しないでください。
- 検温中、感温部を検温する部位に密着させるように固定し、空隙はつからないようにしてください。また、大幅に動かさないでください。
- 電池の電圧が低下すると電池マークが表示されますので電池を取り替えてください。
- 運動や入浴後、30分以上あけてから検温してください。
- 飲食後、30分以上あけてから検温してください。
- 起床直後の行動開始時期は、比較的激しく体温が上昇しますので、30分以上あけてから検温してください。
- 検温部位がわきの場合、わきの下が汗ばんでいるときは、わきの下を乾いた布で数回拭いてから検温してください。
- 検温部位が口中の場合、喫煙後30分以上あけてから検温してください。
- 検温部位が口中の場合、検温30分前からの飲食は控えてください。
- 感温部およびプローブは防浸ですが、表示部は防浸ではありません。本体を水につけないでください。
- 感温部を強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本体を噛まないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。
- 周囲温度は10~40℃の範囲で使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵方法

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかるところ。
- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、重圧、衝撃(運搬時を含む)のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

2. 耐用期間

製造日から正規の保守点検を行った場合、5年間とする。

[当社データによる。]

【保守・点検に係る事項】

- 故障した場合は勝手に修理、分解せず、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 勝手に改造しないでください。
- 本製品に水や化学薬品をかけないでください。
- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をしっかりと絞って拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。

【包装】

1台/箱

*【製造販売者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地
電話: 0120-30-6606
製造元: 欧姆龍(大連)有限公司
OMRON DALIAN CO., LTD. 中華人民共和国