

機械器具 16 体温計  
管理医療機器 電子体温計 14032010  
**チビオンフィット MC-660**


【禁忌・禁止】

(電子体温計を適正にご使用いただくための注意事項です。)

- 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。  
[自己診断は、病気が悪化する原因になります。]
- 人の体温測定以外に使用しないでください。  
[動物などを無理に測ろうとすると、暴れてけがをする原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

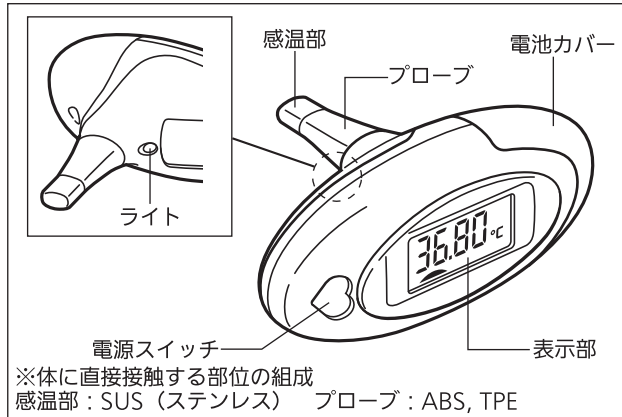

2. 構成

標準付属品

|                     |    |
|---------------------|----|
| 収納ケース               | 1個 |
| お試用電池(リチウム電池CR2032) | 1個 |
| 取扱説明書(品質保証書付き)      | 1部 |

3. 動作原理

本製品は、サーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出し、測定開始から30秒後に予測値を、それ以降は、実測値の最高温度を0.01℃単位で表示する電子体温計である。  
測定中は、測定開始から30秒後に予測測定が終了した事を知らせるブザーが鳴る。測定をそのまま続けると、実測検温開始から約10分で実測測定終了のブザーが鳴る。

4. 本体寸法及び重量

外形寸法：39.4(幅)×77.4(長さ)×65(厚さ)mm  
質量：約37g(電池含む)

5. 電氣的定格

電源：DC3V(リチウム電池CR2032)  
電撃保護：内部電源機器 B形装着部  
消費電力：0.02W

6. 性能及び安全性に関する規格等

- 最高温度保持機能：実測した最高温度値を保持し一定時間表示する
  - デジタル表示：実測した体温をデジタル表示する
  - 最大許容誤差： $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$  (35.00～38.00℃)、 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  (32.00～34.99℃および38.01～42.00℃)  
※標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合
  - 電源電圧：JIS T 1140:2014に適合
  - 防 浸：JIS T 1140:2014に適合
  - 測温範囲：32.00～42.00℃
  - 最小表示単位：0.01℃
  - 測定範囲外告知：32℃未満のとき「L」を表示、42℃を超えるとき「H」を表示
  - 感温部：サーミスタ
  - 測定方式：予測・実測(ピークホールド方式)
  - 体温表示：デジタル表示4桁+℃表示、0.01℃毎
  - 使用環境周囲温度：+10～+40℃ 相対湿度：30～85%RH
- ※試験は JIS T 1140:2014による

【使用目的又は効果】

本製品は、サーミスタ式の電子体温計です。人の体温を測定することができます。わき専用。

【使用方法等】

- スイッチを押して電源を入れます。
  - 表示部が「検温準備完了表示」になっていることを確認します。
  - 感温部をわきに密着させます。
  - 予測検温を終了するまで、本体を保持します。
  - 予測検温終了のブザー音で、予測検温値を確認します。
  - 予測検温のみの場合は、スイッチを2秒押しで電源を切ります。実測検温の場合はそのまま検温を続けます。
  - 実測検温開始から約10分で測定が終了しブザー音が鳴ります。
  - 実測検温値を確認し、スイッチを2秒押しで電源を切ります。
- ・詳細については取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

- わき以外で検温しないでください。
- 連続して検温しないでください。
- 検温中、感温部をわきの下に密着させるように固定し、空隙はつくらないようにしてください。また、大幅に動かさないでください。
- 電池の電圧が低下すると電池マークが表示されますので電池を取り替えてください。
- 運動や入浴後、30分以上あけてから検温してください。
- 飲食後、30分以上あけてから検温してください。
- 起床直後の行動開始時期は、比較的激しく体温が上昇しますので、30分以上あけてから検温してください。
- わきの下に汗をかいている場合は、わきの下を乾いた布で数回拭いてから検温してください。
- 感温部およびプローブ部は一部防湿ですが、表示部は防水ではありません。本体を水につけないでください。
- 感温部を強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。
- 周囲温度は10～40℃の範囲で使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

次のような環境に保管してください。  
保管環境周囲温度：-20～+60℃  
相対湿度：10～95%RH

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかるところ。
- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、重圧、衝撃(運搬時を含む)のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

2. 耐用期間

標準的な使用期間：5年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- 故障した場合は勝手に修理、分解せず、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 勝手に改造しないでください。
- 本製品に水や化学薬品をかけないでください。
- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかくたく絞って拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社  
電話：0120-30-6606  
(オムロン お客様サービスセンター)

販 売 元：ピジョン株式会社  
〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4  
電話：0120-741-887