


機械器具 2 1 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010
心電ケーブル 2・タイプ I

【禁忌・禁止】

- ・破損したり傷が付いている場合には使用しないこと。
- ・MRI装置との併用はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図

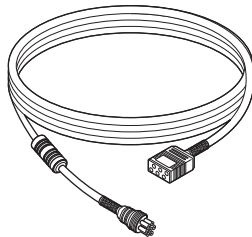

心電ケーブル 2・タイプ I
(ケーブル長：4m)

2. 外形寸法

ケーブル長：4m

3. 使用環境

温度：-10～40℃

湿度：30～90%（結露なきこと）

4. 作動・動作原理

四肢または胸部に装着した電極に接続し、電極間の電位差を当社製ECGモニタに伝達します。

5. 原材料

銅合金、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン、スズメッキ軟銅線、架橋ポリエチレン

【使用目的、効能又は効果】

本製品は当社製ECGモニタにおいて、ECG信号を計測するための心電ケーブルです。病院や同等施設において、ECG計測による患者のモニタリングを行うことを目的に使用します。

【品目仕様等】

電気特性

絶縁抵抗 DC1000V 100MΩ以上

耐電圧 DC5000V/分にて、異常なきこと

機械特性

引張強度 SR：3KG/分以上

適合規格

ANSI/AAMI EC-53


【操作方法又は使用方法等】

本製品は当社製ECGモニタ用の心電ケーブルです。
当社製の生体情報モニタの内、その取扱説明書に本製品が適用可能との記載があるものに適用できます。
適応する心電リード線は下記の製品となります。


- ・心電リード線・タイプ C 3
- ・心電リード線・タイプ C 5
- ・心電リード線 2・タイプ C 3
- ・心電リード線 2・タイプ C 5

1. 使用方法


- (1) 心電ケーブルに心電リード線を接続します。

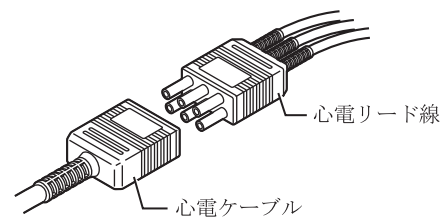


- (2) 心電ケーブルはモニタのECG入力コネクタに接続します。

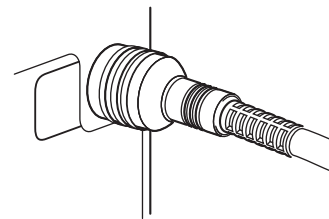

- (3) ECG電極を心電リード線のクリップで挟みます。
安定した測定を行うために、各ECG電極は同種の製品を使用してください。

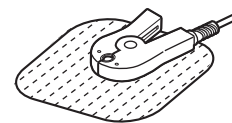

- (4) ECG電極を患者に貼ります。
貼る位置は医師の指示に従ってください。

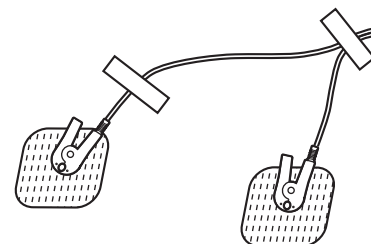

モニタ本体付属の取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・本製品は当社製ECGモニタ用です。他の用途に用いないこと。
- ・本製品は 滅菌はされていません。
- ・本製品が患者の腕などに巻き付かないように注意すること。
末梢に機能障害を起こす恐れがあります。
- ・使用する電極は当社指定品としてください。

〔相互作用〕

- ・MRI装置との併用はしないこと。誘導起電力による局所的な発熱で火傷を負うことがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温多湿、直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。
薬品が蒸散している場所、薬品にふれる場所には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

*〔使用者による保守点検事項〕

1. 注意事項

放射線やオートクレーブやガス等による滅菌は行わないこと。
本製品が劣化します。

2. 使用前の点検

ケーブルが傷んでいないことを確認してください。

3. お手入れ

表面に付着した汚れは、30から50％に薄めたイソプロピルアルコール、または70％エチルアルコールを含ませた布で拭いてください。

【包装】

- 1 本単位、個別包装、未滅菌

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社

* 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

* 外国製造業者：LHI Technology (Shenzhen) Co., Ltd (中国)