

## 心電リード線 2・タイプ C 3 心電リード線 2・タイプ C 5


### 【禁忌・禁止】

- ・破損したり傷が付いている場合には使用しないこと。
- ・MRI装置との併用はしないこと。


### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観図

心電リード線 2・タイプ C 3 の外観を下記に示します。

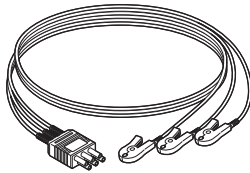

心電リード線 2・タイプ C 5 の外観を下記に示します。

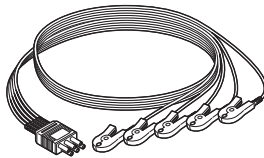

#### 2. 外形寸法

リード線長：90cm

#### 3. 使用環境

温度：-10～40℃

湿度：30～90%（結露なきこと）

#### 4. 作動・動作原理

四肢または胸部に装着した電極に接続し、電極間の電位差を当社製ECGモニタに伝達します。

#### 5. 原材料

銅合金、ポリプロピレン、ABS樹脂、架橋ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、スズメッキ軟銅線、銅箔糸線

### 【使用目的、効能又は効果】

本製品は当社製ECGモニタにおいて、ECG信号を計測するためのリード線です。病院や同等施設において、ECG計測による患者のモニタリングを行うことを目的に使用します。

### 【品目仕様等】

#### 電気特性

絶縁抵抗 DC1000V 100MΩ以上

耐電圧 DC5000V/分にて、異常なきこと

#### 機械特性

引張強度 SR：3KG/分以上

#### 適合規格

ANSI/AAMI EC-53

### 【操作方法又は使用方法等】

本製品は当社製の心電ケーブルを介し、当社製ECGモニタに接続されます。


接続が適応されるケーブルは下記になります。

- ・心電ケーブル・タイプD
- ・心電ケーブル・タイプE
- ・心電ケーブル・タイプG
- ・心電ケーブル・タイプI
- ・心電ケーブル2・タイプI

#### 1. 使用方法


- (1) 心電リード線を心電ケーブルに接続します。

心電ケーブルはモニタのECG入力コネクタに接続します。

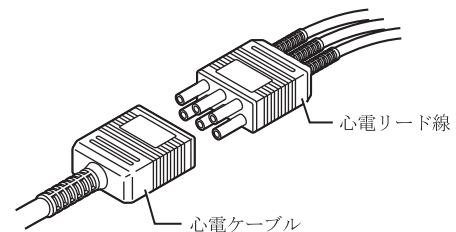


- (2) ECG電極を心電リード線のクリップで挟みます。

安定した測定を行うために、各ECG電極は同種の製品を使ってください。

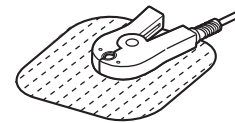

- (3) ECG電極を患者に貼ります。

貼る位置は医師の指示に従ってください。

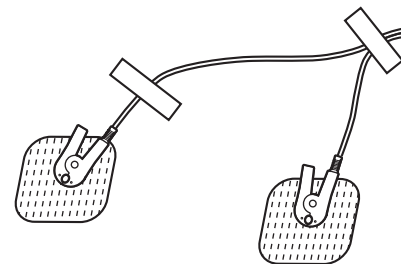

### 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- ・本製品は当社製ECGモニタ用です。他の用途に用いないこと。
- ・本製品は滅菌はされていません。
- ・本製品が患者の腕などに巻き付かないように注意すること。末梢に機能障害を起こす恐れがあります。
- ・使用する電極は当社指定品としてください。

#### 〔相互作用〕

- ・MRI装置との併用はしないこと。誘導起電力による局所的な発熱で火傷を負うことがあります。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温多湿、直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。  
薬品が蒸散している場所、薬品にふれる場所には保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用者による保守点検事項〕

##### 1. 注意事項

放射線やオートクレーブやガス等による滅菌は行わないこと。  
本製品が劣化します。

##### 2. 使用前の点検

- (1) ケーブルが傷んでいないことを確認してください。
- (2) クリップの電極を挟む金属部分に錆、薬液などの付着が無いことを確認してください。

##### 3. お手入れ

表面に付着した汚れは、30から50％に薄めたイソプロピルアルコール、または70％エチルアルコールを含ませた布で拭いてください。

### 【包装】

1 個単位、個別包装、未滅菌

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社

\* 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

外国製造業者：LHI Technology (Shenzhen) Co., Ltd (中国)