


ミニモールド

【形状・構造及び原理等】

本品は熱可塑性エラストマーで造られたモールドであり、簡便にブラケット、ボタン等を歯面に形成させることができる。

モールドは7種類あり、ブラケットボンダー、ボタンボンダー、ワイヤーボンダー、バイトボンダー、ハビットコントロールスパイク、*チューブボンダー、臼歯用バイトバンパーと称する。可塑性材料を本モールド内に注入後歯面に置き、光重合法で接着成型後、モールドを外す。

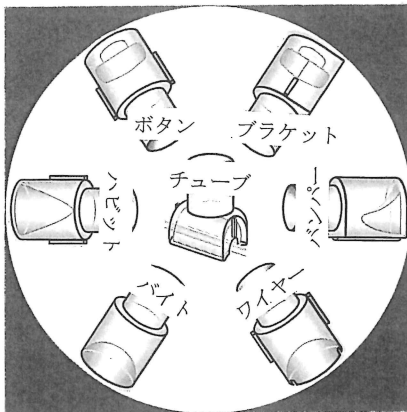

【使用目的又は効果】

目的によってブラケット等を簡便に歯面に形成させる。操作が簡単で、短時間で完了する。

【使用方法等】

1. ボンダーを接着しようとしている歯をエッチングして準備してください。
2. 目的のボンダーチップをハンドルに差し込んでください。
3. ライトキュアレジン（光重合樹脂）をチップに十分に満たしてください。（注意：チップの切断部に樹脂を押し込むために小さなプラスチックの工具を使用することが必要かもしれません）
4. 歯面にチップを置き、軽く押さえてください。
5. ライトを当て、光重合樹脂が十分に反応したならば（光強度と材質により5～20秒間）、傷つけないようにゆっくりと横に傾けながらチップを引き剥がしてください。
6. ボンダーのチップは冷滅菌（例えばアルコールなどで）ができます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

各ボンダーの使用説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

- ①本品は、ゴミ、汚れが付着しないように保管すること。
- ②本品は矯正歯科以外には使用しないこと。
- ③本品は歯科医師以外には使用しないこと。
- ④万が一、変形や変質をしている製品がある場合は、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ⑤装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 1) 開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管する。
- 2) 一度開封した製品は、埃、水分等がつかないようにする。

【使用期限】

上記方法を遵守して、

未開封 : 5年間
開封後（未使用） : 2年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 オーティカ・

インターナショナル

住所 : 〒160-0022

東京都新宿区新宿1-9-5大台ビル4階

電話番号 : 03-3353-3676

FAX 番号 : 03-3353-3830

製造業者 : Ortho Arch Company

1185 Tower Road Schaumburg,

I.L. 60173 (アメリカ)

オーソアーチ社 (アメリカ)

取扱説明書を必ずご参照ください。