

ピンセット

【形状・構造及び原理等】

本品は、口腔内で使用するチューブやブラケット等の矯正器具接着時に、器具を把持し易くするために先端部が細くなっており、あるいは特殊な形状になっている。


本品の原材料はステンレススチール（SUS304）である。

本品には次の4種類がある。


①ピンセット：140mm（TWEEZER）



②逆作用バッカルチューブ用：130mm（KBTPSHR）

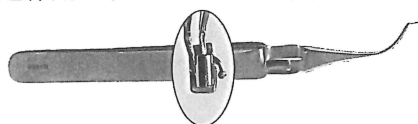


③バッカルチューブ用：140mm（KBTPLG）

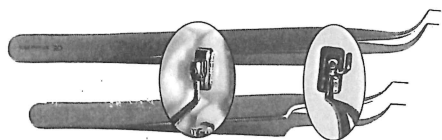

120mm（KBTPSH）

④ブラケット用：130mm（BRPL010）

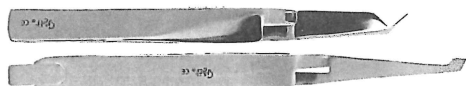

150mm（BRPL020）

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内で使用する歯列矯正装置等を把持するために使用する。

【使用方法等】

- 1) 洗浄し、乾燥後に使用すること。
- 2) 必要な場合は、殺菌あるいは滅菌して使用すること。滅菌方法は、乾熱滅菌、高圧滅菌、薬剤滅菌が可能である。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は使用前、酸、アルカリ類の薬品と一緒に置かないこと。

②本品は、ゴミ、汚れが付着しないように保管すること。

③万が一、変形や変質をしている製品がある場合は、使用せずに弊社までご連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- 1) 開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- 2) 一度開封した製品は、埃、水分等がつかないようにすること。

〔使用期限〕

上記方法を遵守して、

未開封 : 7年間
開封後（未使用） : 2年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 オーティカ・

インターナショナル

住所 : 〒160-0022

東京都新宿区新宿1-9-5大台ビル4階

電話番号 : 03-3353-3676

FAX 番号 : 03-3353-3830

外国製造業者：G&H Wire Company/Flexmedics(USA)
G&H ワイヤー社（アメリカ）