

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2015年7月29日作成

二の腕着圧すっきりアームカバー

【形状・構造】

①概要

末梢部(手首)から中枢部(上腕)にかけて漸減的に圧迫を加える機能を有しています。

②組成

ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

③形状及びサイズ

上肢用の弾性スリーブ

総丈 30～50cm

【効能・効果】

のムクミ上腕の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防する等、静脈還流の促進

【品目仕様等】


各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧

・手首部 17～30 hPa (13～23 mmHg)

・上腕部圧迫圧<手首部圧迫圧

【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。

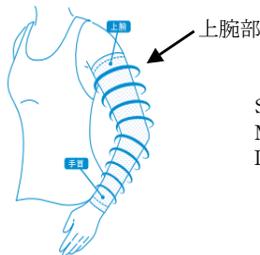

S: 上腕周囲 22～26cm

M: 上腕周囲 25～29cm

L: 上腕周囲 28～32cm

【着用方法】

①内側にサイズ表記がある部分が上腕側になるように、アームカバーをたぐりよせ、手をおします。

②手首部に合わせて、しわやねじれがない事、生地が二重になっていない事を確認してください。

③生地をゆっくと上腕部へと引き上げます。

④上腕部まで引き上げ、生地のたるみやゆがみがないように、調整して下さい。

【使用上のご注意】

①次の方は着用前に医師にご相談ください。

・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うっ血性心不全、神経障害、糖尿病患者、感染性静脈炎

・装着部に炎症、化膿、傷のある方

・装着部に極度の変形、上腕周囲がサイズ範囲外の

方

・繊維に対して過敏症のある方

②上肢部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止して下さい。

③たるみやしわのないように着用してください。

④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。

⑤就寝時は着用しないでください。

【洗濯時のご注意】

●つけ置き洗いや洗剤により、色落ちする事があります。

●色の異なるもの(特に白色)と一緒に洗ったり脱水後の重ね置きは避けてください。

●漂白剤(塩素系・酸素系)は使用しないでください。

●生成り、淡色物の場合には蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。

●タンブラー乾燥(乾燥機の使用)はお避けください。

【包装】

1組(2枚)入り/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】

岡本株式会社

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1

【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場

【連絡先】

岡本株式会社 お客様相談室

TEL 0120-551-975

受付時間:平日10:00～17:00

*土・日・祝日・年末年始・夏期などの特別休暇を除く

<http://www.okamotogroup.com>