

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2017年3月1日作成

ふくらはぎ押し上げサポーター薄手

【形状・構造】

①概要

ふくらはぎの末梢部(足首側)から中枢部(ひざ側)にかけて漸減的に圧迫を加える機能を有しています。

②組成

ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

③形状及びサイズ

膝下サポーター

総丈 16～30cm

【効能・効果】

装着部位の血行促進、あしのムクミ軽減

【品目仕様等】

各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧

・末梢部(足首側) 12～20hPa

・中枢部(膝側) 8～16hPa

・中枢部(膝側)圧迫圧<末梢部(足首側)圧迫圧

【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。




←ふくらはぎ

M: ふくらはぎ周囲 32～38cm

L: ふくらはぎ周囲 36～42cm

【着用方法】

- ①下図の「ア」の位置に該当する側が上、「イ」の位置に該当する側が下になる様に、サポーター本体をたぐりよせ、つま先を通します。
- ②ふくらはぎの下から1/3まで引き上げ、位置を合わせます。
- ③サポーターのハート形の模様がふくらはぎ側の中央になるように調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、位置を調整して下さい。

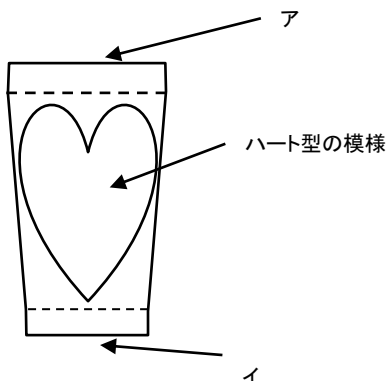

【使用上のご注意】

- ①次の方は着用前に医師にご相談ください。
 - ・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うつ血性心不全、神経障害、糖尿病患者
 - ・足脚部に炎症、化膿、傷のある方
 - ・足脚部の極度の変形、ふくらはぎと足首がサイズ範囲外の方
- ②足脚部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止して下さい。
- ③たるみやしわのないように着用してください。
- ④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。

【洗濯時のご注意】

- 漂白剤(塩素系・酸素系)は使用しないでください。
- 水洗いを十分にしてください。
- 生成り、淡色物の場合は蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 濃色物の場合は白・淡色物と分けてお洗ってください。
- 毛や絹の製品の場合はぬるま湯と中性洗剤でお洗ってください。
- タンブラー乾燥(乾燥機の使用)はお避けください。
- 形をととのえ風通しのよい場所で陰干ししてください。

【包装】

1足(2枚)入り/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】

岡本株式会社

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1

【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場

【連絡先】

岡本株式会社 お客様相談室

TEL 0120-551-975

受付時間: 平日10:00～17:00

*土・日・祝日・年末年始・夏期などの特別休暇を除く

<http://www.okamotogroup.com>