

## 一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2017年6月23日作成(第1版)

## TVスパイラルハイソックスN

## 【形状・構造】

## ①概要

足脚末梢部(足底・足首)から中枢部(ふくらはぎ)にかけて段階的に圧迫を加える機能を有しています。

## ②組成

ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

## ③形状及びサイズ

膝下ハイソックス

足底 16～25cm

総丈 25～40cm

## 【使用目的または効果】

足脚部の静脈血の滞留を軽減、または予防し、血行を促進します。

## 【品目仕様等】

各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧


・足首部 15～30hPa

・ふくらはぎ部 5～20hPa

・ふくらはぎ部圧迫圧<足首部圧迫圧

## 【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。

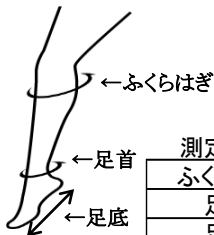

| 測定部位  | (cm)  |       |
|-------|-------|-------|
| ふくらはぎ | 32～36 | 34～38 |
| 足首    | 19～22 | 20～23 |
| 足底    | 22～24 | 24～26 |

## 【着用方法】

※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏のR:右/L:左の目印をご確認の上、着用してください。(図は右足)

- ①ソックスをたぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- ③ロゴム裏部の左右マークが脛部の中央になるよう調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、スパイラルラインを微調整して下さい。



## 【使用上の注意】

①次の方は着用前に医師にご相談ください。

・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うっ血性心不全、神経障害、糖尿病患者

・足脚部に炎症、化膿、傷のある方

・足脚部の極度の変形、ふくらはぎと足首がサイズ表範囲外の方

②足脚部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止してください。

③たるみやしわのないように着用してください。

④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。

⑤就寝時は着用しないでください。

## 【装着時のご注意】

左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏のR:右/L:左の目印を確認の上、着用してください。(図は右足)



## 【洗濯 こんなところにご注意を】

- 濃色の製品は、色移りすることがあるので、他の物と分けて洗濯してください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯後のすすぎ洗いを充分行ってください。
- 寸法変化等の原因になるので、家庭での乾燥機の使用は避けてください。
- ロゴム部分を上にし、日陰でつり干してください。

## 【包装】

1足(2枚)入り/箱

## 【販売者及び製造販売業者と製造業者の氏名又は名称及び住所等】

## 【販売者】

イオン株式会社

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客様サービス係

TEL:0120-28-4196(10時～17時:日曜日は除く)

## 【製造販売業者】

岡本株式会社

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1

TEL 0745-55-2730

## 【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1