

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2018年2月1日作成(第1版)

紳士TVスパイラルハイソックス

【形状・構造】

①概要

足脚末梢部(足底・足首)から中枢部(ふくらはぎ)にかけて段階的に圧迫を加える機能を有しています。

②組成

ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン

③形状及びサイズ

膝下ハイソックス

足底 20～27cm

総丈 34～42cm

【使用目的または効果】

足脚部の静脈血の滞留を軽減、または予防し、血行を促進します。

【品目仕様等】

各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧


・足首部 20～30hPa

・ふくらはぎ部 5～15hPa

・ふくらはぎ部圧迫圧<足首部圧迫圧

【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。

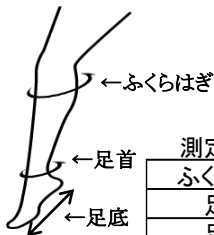

測定部位	(cm)	
ふくらはぎ	36～40	38～42
足首	21～24	22～25
足底	24～26	26～28

【着用方法】

※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏のR:右/L:左の目印をご確認の上、着用してください。(図は右足)

- ①ソックスをたぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- ③ロゴム裏部のLRマークが脛部の中央になるよう調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、スパイラルラインを微調整して下さい。



【使用上の注意】

①次の方は着用前に医師にご相談ください。

・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うっ血性心不全、神経障害、糖尿病患者

・足脚部に炎症、化膿、傷のある方

・足脚部の極度の変形、ふくらはぎと足首がサイズ表範囲外の方

②足脚部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止してください。

③たるみやしわのないように着用してください。

④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。

⑤就寝時は着用しないでください。

【装着時のご注意】

左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏のR:右/L:左の目印を確認の上、着用してください。(図は右足)



【洗濯 こんなところにご注意を】

- 濃色の製品は、色移りすることがあるので、他の物と分けて洗濯してください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯後のすすぎ洗いを充分行ってください。
- 寸法変化等の原因になるので、家庭での乾燥機の使用は避けてください。
- ロゴム部分を上にし、日陰でつり干してください。

【包装】

1足(2枚)入り/箱

【販売者及び製造販売業者と製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【販売者】

イオン株式会社

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客様サービス係

TEL:0120-28-4196(10時～17時:日曜日は除く)

【製造販売業者】

岡本株式会社

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1

TEL 0745-55-2730

【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1