

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2018年6月1日作成(第1版)

TVスパイラルハイソックスW

【形状・構造】

- ①概要
足脚末梢部(足底・足首)から中枢部(ふくらはぎ)にかけて段階的に圧迫を加える機能を有しています。
- ②組成
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
- ③形状及びサイズ
膝下ハイソックス
足底 16~25cm
総丈 25~40cm

【使用目的または効果】

足脚部の静脈血の滞留を軽減、または予防し、血行を促進します。


【品目仕様等】

各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧

- ・足首部 15~30hPa
- ・ふくらはぎ部 5~20hPa
- ・ふくらはぎ部圧迫圧<足首部圧迫圧

【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。

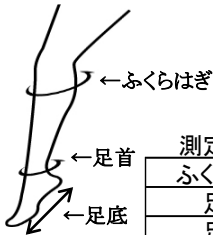

測定部位	(cm)	
ふくらはぎ	32~36	34~38
足首	19~22	20~23
足底	22~24	24~26

【着用方法】

※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏のR:右/L:左の目印をご確認の上、着用してください。(図は右足)

- ①ソックスをたぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- ③ロゴム裏部の左右マークが脛部の中央になるよう調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、スパイラルラインを微調整して下さい。



【使用上の注意】

- ①次の方は着用前に医師にご相談ください。
 - ・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うっ血性心不全、神経障害、糖尿病患者
 - ・足脚部に炎症、化膿、傷のある方
 - ・足脚部の極度の変形、ふくらはぎと足首がサイズ表範囲外の方
- ②足脚部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止してください。
- ③たるみやしわのないように着用してください。
- ④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。
- ⑤就寝時は着用しないでください。

【装着時のご注意】

左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏のR:右/L:左の目印を確認の上、着用してください。(図は右足)



【洗濯 こんなところにご注意を】

- 濃色の製品は、色移りすることがあるので、他の物と分けて洗濯してください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯後のすすぎ洗いを充分行ってください。
- 寸法変化等の原因になるので、家庭での乾燥機の使用は避けてください。
- ロゴム部分を上にし、日陰でつり干ししてください。

【包装】

1足(2枚)入り/箱

【販売者及び製造販売業者と製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【販売者】

イオン株式会社
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
●トップバリュお客様サービス係
TEL:0120-28-4196(10時~17時:日曜日を除く)

【製造販売業者】

岡本株式会社
〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1
TEL 0745-55-2730

【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場
〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1