

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

TVフクラハギサポーター

2018年6月1日作成(第1版)

【形状・構造】

- ①概要  
足脚末梢部(足首)から中枢部(ふくらはぎ)にかけて段階的に圧迫を加える機能を有しています。
- ②組成  
ポリエスエル,綿,ナイロン,ポリウレタン
- ③形状及びサイズ  
膝下ハイソックス  
総丈 18~28cm

【使用目的または効果】

足脚部の静脈血の滞留を軽減、または予防し、血行を促進します。

【品目仕様等】

- 各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧
- ・足首部 12~20hPa
  - ・ふくらはぎ部 9~17hPa
  - ・ふくらはぎ部圧迫圧<足首部圧迫圧

【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。



測定部位	(cm)
ふくらはぎ	32~38
足首	19~23

【着用方法】

- ①製品をたぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首の位置を固定させ、ひざまで引っぱりながらゆっくり引き上げます。
- ③しわを伸ばしながら引き上げます。



製品をたぐりよせてつま先を入れます。

足首の位置を固定させひざまで引っぱりながらゆっくり引き上げます。

しわを伸ばしながら引き上げます。

【使用上のご注意】

- ①次の方は着用前に医師にご相談ください。
  - ・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うっ血性心不全、神経障害、糖尿病患者
  - ・足脚部に炎症、化膿、傷のある方
  - ・足脚部の極度の変形、ふくらはぎと足首がサイズ表範囲外の方
- ②足脚部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止してください。
- ③たるみやしわのないように着用してください。
- ④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。
- ⑤就寝時は着用しないでください。

【装着時のご注意】

サポート力があるため注意しながらゆっくり引き上げてください。  
※爪を立てたり、一気に引き上げないでください。

【洗濯 こんなところにご注意を】

- 濃色の製品は、色移りすることがあるので、他の物と分けて洗濯してください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯後のすすぎ洗いを充分行ってください。
- 寸法変化等の原因になるので、家庭での乾燥機の使用は避けてください。
- ロゴム部分を上にし、日陰でつり干ししてください。

【包装】

1足(2枚)入り/箱

【販売者及び製造販売業者と製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【販売者】

イオン株式会社  
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1  
●トップバリュお客様サービス係  
TEL:0120-28-4196(10時~17時:日曜日は除く)

【製造販売業者】

岡本株式会社  
〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1  
TEL 0745-55-2730

【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場  
〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1