

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2018年8月24日作成

BGスパイラルハイソックスC

【形状・構造】

①概要

足脚末梢部(足底・足首)から中枢部(ふくらはぎ)にかけて漸減的に圧迫を加える機能を有しています。

②組成

毛、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

③形状及びサイズ

膝下ハイソックス

足底 20～28cm

総丈 35～45cm

【効能・効果】

装着部位の血行促進、あしのムクミ軽減

【品目仕様等】

各サイズの中心の方が装着したときの平均圧迫圧


・足首部 15～30hPa

・ふくらはぎ部 5～20hPa

・ふくらはぎ部圧迫圧<足首部圧迫圧

【サイズ表記】

より効果的に着用いただくために、下記のサイズ内でご着用ください。

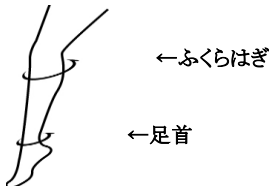

測定部位	サイズ(cm)
ふくらはぎ周囲長	36-42
足首周囲長	21-25
足底長	25-29

【着用方法】

※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏の「右」、「左」の目印をご確認の上、着用してください。

- ①ソックスをたぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- ③ロゴム裏部の左右マークが脛部の中央になるよう調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、スパイラルラインを微調整して下さい。

着用方法 ※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏の「右」、「左」の目印をご確認の上、着用してください。(図は右足)



【使用上のご注意】

- ①次の方は着用前に医師にご相談ください。
・深部静脈血栓症、重度の血行障害、うつ血性心不全、神経障害、糖尿病患者
・足脚部に炎症、化膿、傷のある方
・足脚部の極度の変形、ふくらはぎと足首がサイズ表範囲外の方
- ②足脚部に痛み、しびれ、皮膚や爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び不快感、違和感がある場合には使用を中止して下さい。
- ③たるみやしわのないように着用してください。
- ④ロゴムを折り返して着用したり、2枚重ねて着用しないでください。
- ⑤就寝時は着用しないでください。

【洗濯時のご注意】

- 漂白剤(塩素系・酸素系)は使用しないでください。
- 水洗いを十分にしてください。
- ロゴム部を上にして、形を整えて陰干ししてください。
- 生成り、淡色物の場合は蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 濃色物の場合は白・淡色物と分けてお洗ってください。
- 毛や絹の製品の場合はぬるま湯と中性洗剤でお洗ってください。
- タンブラー乾燥(乾燥機の使用)はお避けください。
- 洗濯時の毛羽立ちを防ぐ為に裏返しにして、ネットを使用して洗ってください。
- 素材の特性上、濡れた状態で強く摩擦されると毛羽立ち・黄変(白化)することがありますのでご注意ください。
- 特殊な編み構造のため、洗濯後シワが発生する場合がありますが着用上支障はございません。

【包装】

1足(2枚)入り/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】

岡本株式会社

〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚150番地の1

【製造業者】

岡本株式会社 奈良工場

【連絡先】

岡本株式会社 お客様相談室

TEL 0120-551-975

受付時間: 平日10:00～17:00

*土・日・祝日・年末年始・夏期などの特別休暇を除く

<http://www.okamotogroup.com>