

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN32692000  
**オクルス イージールーペ**

**【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

装備された拡大レンズにより以下の2種類がある。

- ① 倍率 1.8 倍
- ② 倍率 2.5 倍

2. 形状、構造



寸法: 140(W) mm×155(D) mm×45(H) mm

質量:

- ① 倍率 1.8 倍 55 g
- ② 倍率 2.5 倍 50 g

**【使用目的又は効果】**

本品は、外科処置時に術者が作業野の拡大像を得るために用いる。

**【使用方法等】**

1. 使用方法

- (1) 拡大レンズの眼幅を眼幅調整つまみにより術者の瞳孔間距離に合わせる。
- (2) 眼鏡フレームを装着して、両眼で拡大レンズを覗く。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- (1) 使用前に拡大レンズ部が眼鏡フレームに固定されていることを確認すること。
- (2) レンズ面に傷をつけたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないようにすること。
- (3) 使用後はレンズをクリーニングすること。

**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*\* 製造販売業者: 株式会社ニコンソリューションズ  
TEL 03-3773-8273

外国製造業者: OCULUS Optikgeräte GmbH  
ドイツ