

\*\*2026 年 3 月改訂（第 5 版）

\*2020 年 8 月改訂（第 4 版）

届出番号 13B1X10106000028

器具器械（58）歯科インプラント技工用器材  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

## GS 技工用アナログ

### 【禁忌・禁止】

- ・ 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・ 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ・ 本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

(1) ラボアナログ

(1)-① リジッドラボアナログ



(1)-② フィクスチャーラボアナログ



(1)-③ コンバーチブルラボアナログ



(1)-④ O-リングラボアナログ



(2) コンバーチブルポリッシングプロテクター



(3) アバットメントセクター

(3)-① GS アングルドアバットメントセクター



(6)-② TS アバットメントセクター



<ストレートタイプ> <アングルドタイプ>

### \*【原材料】

チタン合金、ステンレス鋼、チタン、PSU 樹脂

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

### \*【使用方法等】

・本品は未滅菌品であるため、使用前にオートクレープで滅菌を行ってから使用する。

（滅菌条件 温度：132℃、時間：15 分）

1. ラボアナログ

- ① インプラントの印象を採得する。
- ② 採得した印象体に本品を取り付ける。
- ③ 一般的な方法で作業模型を作成し、義歯を作製する。

2. コンバーチブルポリッシングプロテクター

- ① 一般的な方法で印象を採得し、義歯を作製する。
- ② 本品を連結し、義歯を研磨する。

3. アバットメントセクター

- ① インプラントの印象を採得する。
- ② 採得した印象体に本品を取り付ける。
- ③ 咬合関係により角度を選定する。

### 【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせてください。
- ② 本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、ご使用下さい。アレルギーテストは皮膚科の専門医にご相談ください。
- ③ 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないでください。ご使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断してください。
- ④ 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。
- ⑤ 本製品は非滅菌状態で出荷しています。使用前にオートクレープで滅菌を行ってください。（滅菌条件 温度：132℃、時間：15 分）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）  
（OSSTEM Implant CO., LTD.）