

再使用禁止

リジッドバーアウトシリンダー

【禁忌・禁止】

1. 改造の禁止（形態変更や改造等しないこと）
2. 異常時の使用禁止（本品に劣化や異常が見られたときは使用を中止すること）
3. 注意事項の順守（本品の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること）
4. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要：

本品は、外観がシリンダー形状で、内部構造が歯科用インプラントアバットメントの外部形状と同一であり。歯科用インプラントアバットメントに、コーピングと同様にかぶせて使用する。又、原材料がポリアセタール製で、ワックスの支台となり、鋳造時に焼失する。

2. 構成品

(1) バーンアウトシリンダー（シングル）

φ4.0/φ4.5/φ5.0/φ6.0/φ7.0、ミニ/レギュラータイプ



(2) バーンアウトシリンダー（ブリッジ）

φ4.0/φ4.5/φ5.0/φ6.0/φ7.0、ミニ/レギュラータイプ



【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. ブリッジ用

- (1) 作業模型にリジッドラボアナログ（※）又は GS トランスファーアバットメント（※）を配置する（図 1）。
- (2) 作業模型上のリジッドラボアナログ（※）又は GS トランスファーアバットメント（※）に本品を配置する（図 2）。
- (3) 本品又は支台模型の周囲をワックスアップする（図 3）。
- (4) 標準的な手順で鋳造する。

2. シングル用

- (1) 作業模型にリジッドラボアナログ（※）を配置する（図 4）。
- (2) 補綴物の装着の為にリジッドラボアナログ（※）の形状を修正する（図 5）。
- (3) 形状を修正したリジッドラボアナログ（※）に本品を配置し、修正された形状に合わせて本品の形状を修正する（図 6）。

- (4) 口腔内に既に装着した GS リジッドアバットメント（※）に、形状修正された本品を配置し、本品の形状に合わせて GS リジッドアバットメント（※）の形状を修正する（図 7）。

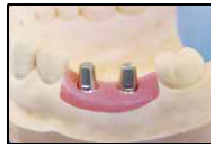


図 1

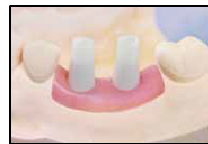


図 2

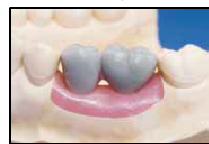


図 3

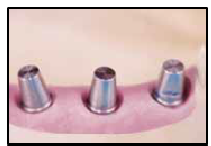


図 4

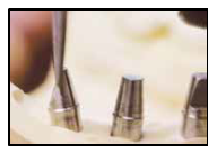


図 5

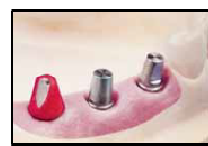


図 6



図 7

※印の承認番号等は以下のとおり（製造販売業者は全て自社）

(1) リジッドラボアナログ

販売名：GS 技工用アナログ

製造販売届出番号：13B1X10106000028

(2) GS トランスファーアバットメント

販売名：GS System アバットメント

製造販売承認番号：22300BZI00024000

(3) GS リジッドアバットメント

販売名：GS System アバットメント

製造販売承認番号：22300BZI00024000

【使用上の注意】

**** 1 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）**

併用禁忌・禁止（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
GS System アバットメント（承認番号 22300BZI00024000）の構成品である GS リジッドアバットメント及び GS トランスファーアバットメント以外の医療機器	インプラントや機器等が正常に動作せず、緩みや破損につながるおそれがある	インプラントが適切に埋入できないため、固定力等が不足する

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）