


## 歯肉用はさみ

### 【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状、構造

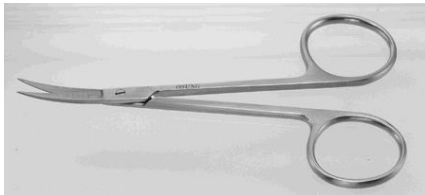

#### 2. 材料

ステンレス鋼

#### 3. 原理

回転軸のある 2 枚の刃を切断する材料の上で閉じることによって切断を行う。

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科手術用に特別に設計された器具である。

### 【使用方法等】

1. ハンドルを親指と中指等を用いて握ると刃が閉じ、対象物を切断できる。
2. 本品は未滅菌の状態で供給されるため、必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。

### 【使用上の注意】

1. 本品の取扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋭部等に細心の注意を払い、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。
2. 滅菌を行う場合にはロック等が開いた状態で行うこと。
3. 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管方法>

1. 本品の保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

### \*【保守・点検に係る事項】

#### <洗浄方法>

1. 洗浄装置で洗浄する時は、先端部同士が接触して損傷することがないよう注意をすること。
2. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
3. 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。
4. 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用すること。（家庭用洗剤は使用しないでください。）
5. 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

#### <滅菌方法>

オートクレーブ（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

### \*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441／FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）  
（OSSTEM Implant CO., LTD.）