

機械器具（25） 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 31776000

口腔用ミラー

【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造



2. 材料
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具。

【使用方法等】

1. 本品を口腔内に挿入し、撮影部位が映る位置に鏡面側を向けてセットする。
2. 本品の位置、角度を調整して、本品表面に必要な画像を映し出し撮影を行う。
3. 本品は未滅菌の状態で供給されるため、必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。

【使用上の注意】

1. 本品の取扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋭部等に細心の注意を払い、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。
2. 滅菌を行う場合にはロック等が開いた状態で行うこと。
3. 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないこと。
4. 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温での乾燥により変質、変色及び鏡面曇りが生じることがある。
5. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着した状態で長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
6. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
7. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 本品の保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

*【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守・点検事項＞

使用前・使用後には以下の点検を行うこと。

1. 鏡面のキズ、ヒビ、破損等がないこと。
 2. 歯鏡全体にキズや腐食がないこと。
 3. 鏡枠の中で鏡面が動かないこと。
 4. 接合部に錆びや剥離等がないこと。
- 上記のような異常が見られた場合は、使用を中止すること。

＜滅菌方法＞

オートクレーブ（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441／FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）