

## エクステンションホース

### 【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状、構造



#### 2. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

### 【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。吸引嘴管等との接続に用いる場合もある。

### 【使用方法等】

1. 使用前に、必要に応じて洗浄、滅菌する。
2. 吸引器、回収容器又は吸引嘴管等の接続口に接続する。

### 【使用上の注意】

1. 本品の取扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋭部等に細心の注意を払い、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。
2. 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。
3. 本品をアセトン、ベンゼン等の有機溶剤を接触させないこと[強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため]。
4. 再使用する場合は、十分洗浄し、必要に応じて滅菌すること。
5. 本品を吸引器、回収容器または吸引嘴管等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

1. 本品の保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）  
(OSSTEM Implant CO., LTD.)