


機械器具（66） 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

HySiI ディスペンサー

【形状・構造及び原理等】

本品は、専用カートリッジに充填されたペーストを一定の割合で吐出させるガンタイプのディスペンサーである。

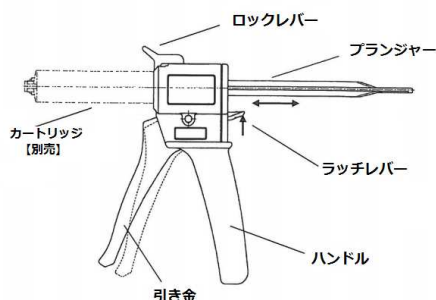

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）

【使用目的又は効果】

歯科用印象材を練和するために用いる。

【使用方法等】

通法により、以下の操作を行う。

1. ラッチレバーを押し上げながら、プランジャーを引き戻す。
2. ロックレバーを引き上げてカートリッジを差し込み、ロックレバーを元に戻す。
3. カートリッジのキャップを取り外し、ハンドルを握り、引き金を引き、ペーストをごく少量吐出させ、左右両方のペーストが均一に吐出されたことを確認する。
片方のみが吐出した場合には、均等になるまでペーストを吐出させる。
4. ミキシングチップをカートリッジへ確実に取り付ける。
5. ハンドルを握り、練和物をミキシングチップ先端から吐出させる。握りにくい場合には、付属のスペーサーをハンドルとカートリッジの間に挿入する。
6. 作業終了後、使用済みミキシングチップを取り外し、吐出口の余剰ペーストをガーゼ等で除去してからカートリッジキャップを装着する。
 - (1) カートリッジをディスペンサーに装着したまま保管する場合には、次回使用時は 3. の操作以降を繰り返す。
 - (2) カートリッジをディスペンサーから取り外して保管する場合には、ラッチレバーを押し上げながらプランジャーを完全に引き戻し、ロックレバーを引き上げ、カートリッジを取り外す。次回使用時は、2. 以降の操作を繰り返す。

《使用方法に関連する使用上の注意》

使用後のカートリッジは、使用したミキシングチップをつけたままにしておくか、カートリッジキャップを用いて、ペーストが空気に触れないようにしておくこと。ペーストが詰まったりして、硬化不良の原因となる恐れがある。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 使用する印象材の詳細については、それぞれの添付文書を参照すること。
- (2) 本品は、オートクレーブによる滅菌が可能であるが、乾燥機能を有した機種で使用する際にはその温度に注意すること。あるいは、アルコールのような強い有機溶媒を含まない市販の洗浄剤を利用することもできる。