

機械器具(66) 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

HySil ミキシングチップ


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、専用カートリッジに取り付けるプラスチック製のチップである。

(ミキシングチップ)

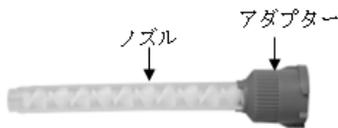

(口腔内注入チップ)



【使用目的又は効果】

歯科用印象材を練和するために用いる。

【使用方法等】

通法により、以下の操作を行う。

1. ディスペンサー(別売)に専用カートリッジを取り付ける。
2. カートリッジのキャップ(又は、使用済みミキシングチップ)を取り外し、2種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
3. 本品(ミキシングチップ)のアダプター部分のノッチとカートリッジの切り欠きを合わせてセットし、時計回りに90°回転させ、確実に固定する。
4. ディスペンサーのレバーを握り、ペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。
5. 本品を取り外す場合には、反時計回りに90°回転させ本品のノッチとカートリッジの切り欠きを合わせて引き抜く。

《使用方法に関連する使用上の注意》

使用後のカートリッジは、使用したミキシングチップをつけたままにしておくか、カートリッジキャップを用いて、ペーストが空気に触れないようにしておくこと。ペーストが詰まったりして、硬化不良の原因となる恐れがある。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 使用する印象材の詳細については、それぞれの添付文書を参照すること。
- (2) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- (1) 使用后、本品を取り外すか、装着したまま保管するかは、使用する製品(カートリッジ)の指示に従うこと。
- (2) 高温多湿を避けて保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目5番37号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社(大韓民国)
(OSSTEM Implant CO., LTD.)