

OSSTEMリンク

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・当社以外の製品と併用しないこと。

＜使用方法＞


- ・口腔内では使用しないこと。
- ・本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


(1) Link Abutment

Public 用／Cerec 用、Hex／Non-Hex

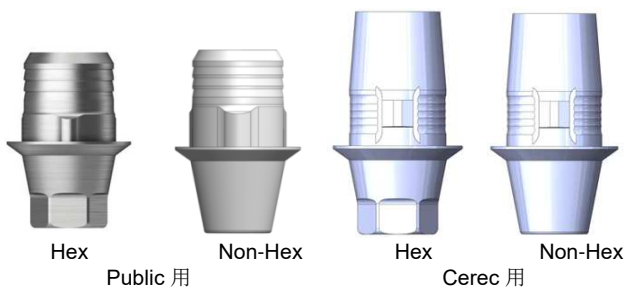

(2) Scan Body

Public 用／Cerec 用

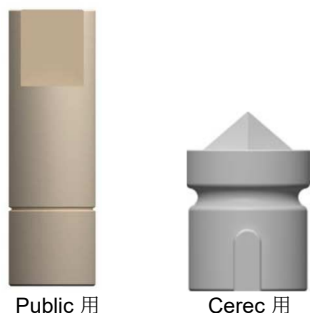

(3) EbonyGold Screw



【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を歯科用 CAD/CAM システムで作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 製作した作業模型に Link Abutment を締結する為、EbonyGold Screw を締め付け、模型に固定させる。（図 1）
2. 締結された Link Abutment に Scan Body を嵌合させる。（図 2）
3. 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを使用し、作業模型をスキャニングする。
4. 収集したデータを CAD ソフトウェアを使用し、上部構造を設計する。
5. 設計されたデータで、上部構造を加工する。



図 1



図 2

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. Link Abutment を作業模型に締結する際に、リンクベースの突起方向を舌側側向きに位置するように締結し、上部構造の唇側の幅を確保すること。（図 3）
上部構造の唇側の幅が確保できない場合、アバットメントが透けて見えるおそれがある。

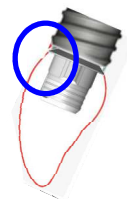


図 3

2. Scan Body を Link Abutment に締結する際に、突起の方向を一致させること。
3. 本品に、過度の力、衝撃をかけないこと。

【使用上の注意】

- ・本品は口腔内に使用しないこと。
- ・本品は、併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用 방법에準じて作業すること。
- ・使用前に変形、破損等の有無を確認し、異常が認められる場合は、新しいものと交換すること。
- ・使用前に汚れや遺物付着がある場合は、きれいな不織布等で拭き取ってから使用すること。
- ・本品を金属性のピンセット等で把持しないこと。また、本品を金属製のインスツルメントで清掃しないこと。（表面に傷がつき、正確な位置情報が取得できない恐れがある。）
- ・本品の加工、改造は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）