

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

OSSTEM リンク

【禁忌・禁止】

- ＜併用医療機器＞
 - ・当社以外の製品と併用しないこと。
- ＜使用方法＞
 - ・口腔内では使用しないこと。
 - ・本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号
TEL：03-5747-9441
FAX：03-5747-9442

** 製造業者：OSSTEM IMPLANT Co., Ltd
オステムインプラント株式会社（大韓民国）

【形状・構造及び原理等】

- ** 1. 形状・構造
- (1) Link Abutment I
Public 用／Cerec 用、Hex／Non-Hex
 - (2) Link Abutment II
 - (3) Link Abutment III
 - (4) Scan Body
Public 用／Cerec 用
 - (5) EbonyGold Screw
 - (6) Link Abutment Screw

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を歯科用 CAD/CAM システムで作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

- ** [使用方法]
1. 製作した作業模型に Link Abutment を締結する為、必要に応じて EbonyGold Screw または Link Abutment Screw を締め付け、模型に固定させる。
 2. 締結された Link Abutment に Scan Body を嵌合させる。
 3. 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを使用し、作業模型をスキャニングする。
 4. 収集したデータを CAD ソフトウェアを使用し、上部構造を設計する。
 5. 設計されたデータで、上部構造を加工する。

** [使用方法に関連する使用上の注意]

1. Link Abutment を作業模型に締結する際に、リンクベースの突起方向を舌側側向きに位置するようにし、上部構造の唇側の幅を確保すること。
上部構造の唇側の幅が確保できない場合、アバットメントが透けて見えるおそれがある。
2. Scan Body を Link Abutment に締結する際に、突起の方向を一致させること。
3. 本品に、過度の力、衝撃をかけないこと。

【使用上の注意】

- ・本品は口腔内に使用しないこと。
- ・本品は、併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用 방법에準じて作業すること。
- ・使用前に変形、破損等の有無を確認し、異常が認められる場合は、新しいものと交換すること。
- ・使用前に汚れや異物付着がある場合は、きれいな不織布等で拭き取ってから使用すること。
- ・本品を金属性のピンセット等で把持しないこと。また、本品を金属製の器具で清掃しないこと。（表面に傷がつき、正確な位置情報が取得できない恐れがある。）
- ・本品の加工、改造は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。