

OSSTEMプレミルドアバットメント

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・当社以外の製品と併用しないこと。

＜使用方法＞

- ・再使用禁止
- ・本品は口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

（1）Pre-Milled Abutment

レギュラータイプ／ミニタイプ、Hex／Non-Hex

番号	形状
①	
②	
③	
④	

（2）EbonyGold Screw

レギュラータイプ／ミニタイプ


番号	形状
⑤	

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を歯科用 CAD/CAM システムで作製するために用いる歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

1. 製作模型から口腔内情報を収集し、CAD ソフトウェアを使用して上部構造（アバットメント）を設計する。（図 1）
2. 該当する Pre-Milled Abutment に対応するデンタルミリングマシンを選択し、治具にプレミルドを装着する。（図 2）
3. デンタル CAM ソフトウェアでデザインした情報をデンタルミリングマシンにインポートする。
4. ソフトウェア上の加工範囲を設定する。（図 3）
5. 最終的に設定したデータを基に Pre-Milled Abutment をミリング加工し、アバットメントを製作する。（図 4）
6. 製作されたアバットメントを模型に締結する為、EbonyGold Screw を締め付け、アバットメントを固定させる。

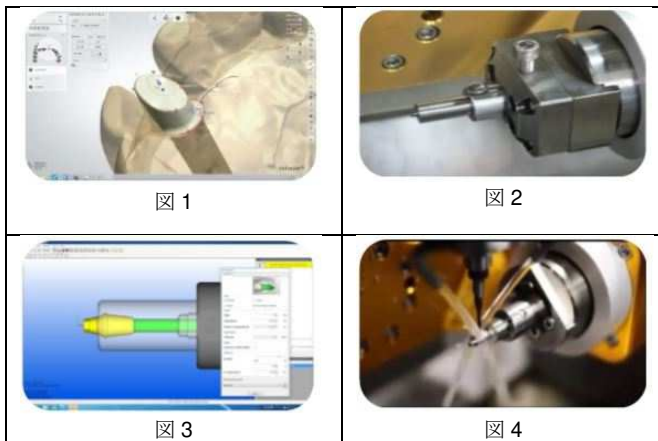

【使用上の注意】

- ・本品は口腔内に使用しないこと。
- ・本品は、併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方を準じて作業すること。
- ・使用前に変形、破損等の有無を確認し、異常が認められる場合は、新しいものと交換すること。
- ・各種プリミルドジグに対応するミリングマシンを選択し、本品を加工すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）