

OSSTEM プレミルドスキャンボディ

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・当社以外の製品と併用しないこと。

＜使用方法＞

- ・本品は口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) Scan Body Regular／Mini



(2) Ti screw Regular (Green)／Mini (Yellow)



【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を歯科用 CAD/CAM システムで作製するために用いる歯科技工用の器具である。レプリカに装着して位置情報を取得するための計測ジグである。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 作業模型に取り付けられたレプリカに Scan Body を挿入します。
2. Scan Body のアクセスホールから Ti screw を挿入し、ドライバーで締結して固定します。
3. 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを使用して、本品が装着された作業模型をスキャニングします。
4. スキャンデータを基に、各種 CAD ソフトウェアを用いて上部構造を設計します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 本品をレプリカに装着した際、適切な嵌合が得られているか確認し、異常がある場合は使用しないこと。
2. レプリカ、ドライバーは、本品の種類に対応した製品を用いること。
3. 本品に、過度の力、衝撃をかけないこと。
(本品の破損や、正確な位置情報が取得できない恐れがある。)

【使用上の注意】

- ・本品は、口腔内に使用しないこと。
- ・本品は、併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方法を準じて作業すること。
- ・使用前に変形、破損等の有無を確認し、異常が認められる場合は、新しいものと交換すること。
- ・使用前に汚れや遺物付着がある場合は、きれいな不織布等で拭き取ってから使用すること。
- ・本品を金属性のピンセット等で把持しないこと。また、本品を金属製のインスツルメントで清掃しないこと。(表面に傷がつき、正確な位置情報が取得できない恐れがある。)
- ・本品の加工、改造は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
(OSSTEM Implant CO., LTD.)