

2021 年 5 月制定 (第 1 版)

届出番号 13B1X10106000106

歯科材料 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

TS マルチチタンベース

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、記載された【使用目的】以外の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品の口腔内には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成品

(1) TS マルチチタンベース



番号	名称	カタログ番号(型番)	備考
(1)	TSマルチチタンベース	TSMTB0405G	-
(2)		TSMTB0410G	-
(3)		TSMTB0605G	-



番号	名称	カタログ番号(型番)	備考
(1)	TSマルチチタンベース	TSMTB0405G	-
(2)		TSMTB0410G	-
(3)		TSMTB0605G	-

(2) TS マルチチタンベーススクリュー



番号	名称	カタログ番号(型番)	備考
(1)	TSマルチチタンベーススクリュー	TSMTBS	-

(3) TS マルチスキャンボディ



番号	名称	カタログ番号(型番)	備考
(1)	TSマルチスキャンボディ	TSMSBC	-

2. 原理

本品は、作業模型を製作し、歯科用 CAD/CAM システムを使用して歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具及びそのセットである。

【原材料】

純チタン(Ti Grade 3)、チタン合金(Ti-6Al-4V)

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を制作するために用いる歯科技工用器具である。

【使用方法等】

1. 制作した模型に、TS マルチアバットメントを締結する。
2. TS マルチアバットメントの上部に、TS Multi スキャンボディ(本品の構成品)を装着する
3. 各種歯科用 CAD/CAM システムのスカナを利用し、作業模型をスキャンする
4. スキャンしたデータを基に、CAD ソフトウェアを用いて上部構造を設計する。
5. 設計完了したデータで補綴物を制作し、TS マルチチタンベース(本品の構成品)を装着する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 本品に、過度の力、衝撃をかけないこと。
- ・ 使用前に汚れや異物付着がある場合は、清浄な不織布等で異物を拭き取ってから使用すること。
- ・ スクリューは包装に記載されたトルクで締結し、緩み防止のために 2~3 回再度締めることを推奨する。
- ・ スクリューを締め過ぎた場合、破折する可能性がある。

【使用上の注意】

- ・ 本品は未滅菌品であるため、使用前に必要なに応じて滅菌を行うこと(滅菌条件温度：132℃、時間：15 分)
- ・ 本品は、切削加工しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号
TEL：03-5747-9441
FAX：03-5747-9442

製造業者：OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. (大韓民国)
(オステムインプラント株式会社)