

歯科材料 (66) 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000


HySil プラス Mixing Tip

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、指定された専用のカートリッジ以外との使用は禁止する。
- ・ 本品は、再使用を禁止する。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成品

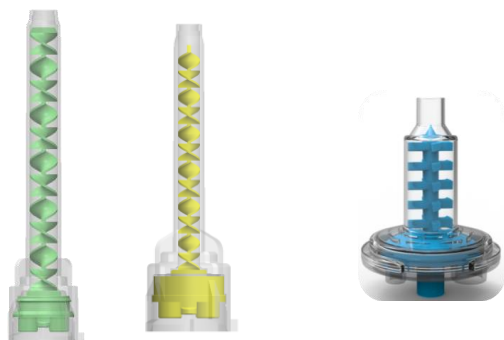

Mixing Tip

Mixing Tip Auto

【使用上の注意】

- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品を曲げたり潰さないこと。
- ・ 本品が破損されている場合、使用しないこと。
- ・ 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. (大韓民国)
(オステムインプラント株式会社)

番号	名称	カタログ番号(型番)	備考
(1)	Mixing Tip	OMTH100	ヘビーボディ用 Mixing Tip (×100ea)
		OMTH300	ヘビーボディ用 Mixing Tip (×100ea)
		OMTL100	ライトボディ用 Mixing Tip (×100ea)
		OMTL300	ライトボディ用 Mixing Tip (×100ea)
(2)	Mixing Tip Auto	OMTA50	自動練和器専用カートリッジ用 Mixing Tip (×100ea)

2. 原理

本品は、専用のカートリッジから押し出された印象材のベースと硬化剤が本品の内部を通過しながら練和され、トレーに印象材を流すための器具である。

【原材料】

PP、POM

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科印象材を練和し、注入するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. ディスペンサー(別売り)に専用のカートリッジを取り付ける。
2. カートリッジのキャップを取り外し、2種のペーストが均等に吐出されるか確認する。
3. キャップを取り外したカートリッジの先端に本品をセットし、カートリッジの切り欠きにはまるように本品を時計回りに 90°回転させて固定する。
4. ディスペンサーを使用して印象材を押し出して印象材を吐出させる。