

2021年5月31日制定(第1版)

届出番号:13B1X10106000111

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

MS ラボシステム

【禁忌・禁止】

- ・ 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・ 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ・ 本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) MS ラボアナログ (ナローリッジ)



(2) MSバーンアウトシリンダー (ナローリッジ)



<シングル>



<ブリッジ>

【使用目的、効能又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具である。

【原材料】

ステンレス鋼、ポリアセタール

【使用方法等】

1. MS ラボアナログ (ナローリッジ)

- (1)インプラントの印象を採得する。
- (2)採得した印象体に本品を取り付ける。
- (3)一般的な方法で作業模型を作成し、義歯を作製する。

2. MSバーンアウトシリンダー (ナローリッジ)

- (1)作業模型にMSラボアナログ (ナローリッジ) を配置する。
- (2)作業模型上のMSラボアナログ (ナローリッジ) に本品を配置する。
- (3)本品又は支台模型の周囲をワックスアップする。
- (4)標準的な手順で鋳造する。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ①本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせてください。
- ②本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、ご使用下さい。アレルギーテストは皮膚科の専門医にご相談ください。

- ③歯科医師、歯科技工士以外は使用しないでください。ご使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断してください。
- ④本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。
- ⑤本製品は非滅菌状態で出荷しています。使用前にオートクレーブで滅菌を行ってください。(滅菌条件 温度：132℃、時間：15分)

【包装】

包装単位：1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎四丁目5番37号
TEL：03-5747-9441
FAX：03-5747-9442

外国製造所名：OSSTEM Implant Co., Ltd.
(オステムインプラント株式会社)

外国製造所国名：大韓民国