

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70750000
SS リンク

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本文書に記載されている使用目的以外の使用しないこと。
- 異物や異変が見える場合は、使用しないこと。
- 本品の変形を起こす恐れのある改造等を行わないこと。

正確な位置情報が取得できない恐れがある。）

【保管方法及び有効期限】

本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

本品は、以下の品目で構成されている。

番号	名 称
(1)	SS リンク
(2)	Ti Screw


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37
TEL：03-5747-9441
FAX：03-5747-9442

製造業者：OSSTEM IMPLANT Co., LTD.
国 名：大韓民国

2. 形状

(1) SS リンク

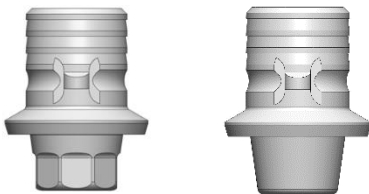

(2) Ti Screw



3. 原材料

チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

- 製作した作業模型に SS リンクを締結する。
- 締結された SS リンクにスキャンボディを装着させる。
- 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを使用し、作業模型をスキャンする。
- 収集したデータを基に CAD ソフトウェアを使用し、上部構造を設計する。
- 設計されたデータで、上部構造を加工する。

【使用上の注意】

- 本品を口腔内で操作しないこと。
- 本品は、併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方法に準じて作業すること。
- 使用前に汚れや遺物付着がある場合は、きれいな不織布等で拭き取ってから使用すること。
- 本品を金属性のピンセット等で把持しないこと。また、本品を金属製のインスツルメントで清掃しないこと。（表面に傷がつき、