

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000


プレメント採精シート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

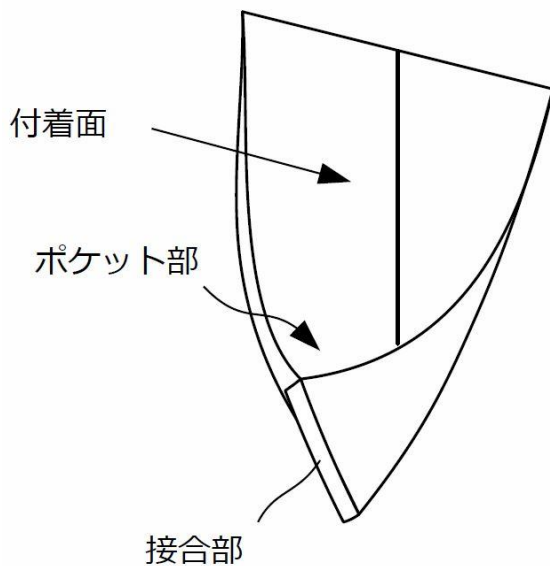

寸法：縦 297mm×横 105mm

各部の名称および成分

名称	成分
プレメント採精シート	PET12 μ LLDPE 75 μ シート

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は精子を採取するために使用される。
2. 本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

1. シート上部を開き、両サイドのテープで壁などにたわみなく貼り付ける。
2. シート下部を下方方向に無理なく引き形を整える。
3. マスターベーションを行い射精を行う。
4. 採精後は速やかにシリンジなどで精液を吸い取る。

【使用上の注意】

1. 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 感染症を予防するためによく手を洗い、清潔な環境で使用する。
3. 使用毎に 1 枚取出し、袋のチャックで密閉する。
4. シートの内側（撥水面）は極力触れないようにする。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

5 枚／1 袋入

* 【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社 オンリースタイル
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-9 第 2 オーエスビル
TEL 03-4455-7426 FAX 03-4579-0665
MAIL:customer-info@onlystyle.jp