

医04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（71105001）

# onaka想い<sup>®</sup> サニタリーショーツ

## 【禁忌・禁止】

以下の部位には使用しないでください。

### （1）感染部位

〔血管拡張と血流増加が、炎症、かゆみ・かぶれを悪化させる恐れがあります。〕

### （2）出血部位または出血の可能性がある部位

〔血管拡張が出血の増大または出血を引き起こす恐れがあります。〕


### （3）その他医師が不適当と判断した部位

## 【形状・構造及び原理等】


### 1. 形状・構造

原材料：ポリエステル（アースメディカルパウダー\*を含む）、ポリウレタン

\*アースメディカルパウダーは数種類の金属を含む微細粒子です。

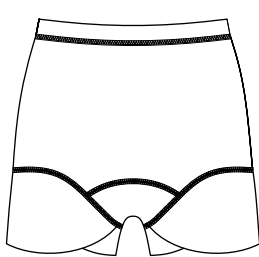

前

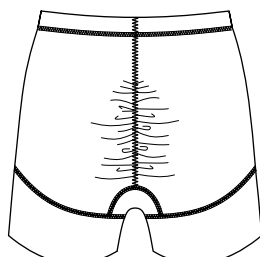

後

### 2. 原理

ポリエステル繊維に含まれるアースメディカルパウダーが体熱の遠赤外線を輻射する。

## 【使用方法等】

本品を衣服として直接着用する。

生理1週間前からの着用をおすすめします。

## 【使用目的または効果】

血行促進作用により疲労回復や痛み緩和（コリ、生理痛、筋肉痛）の症状改善を行う。

本品は再使用可能である。

## 【使用上の注意】

1. 治療中の方や下記に該当する場合は、必ず医師または専門家と相談の上で使用ください。
  - （1）妊娠初期の不安定期または出産直後の方
  - （2）糖尿病等による高度な末梢循環障害および知覚障害のある方
  - （3）急性損傷や急性炎症が有る方
  - （4）血栓性静脈炎の疑いのある部位
  - （5）悪性腫瘍組織またはその周辺の部位
  - （6）局所性刺激製剤を使用した部位
  - （7）重度の浮腫が有る方
  - （8）体温が38℃以上の方
  - （9）血行促進作用のある薬を服用している場合
2. 他の治療器と同時に使用しないで下さい。
3. 使用中に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してください。
4. 患部に発疹、かゆみ、あかみなどが現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
5. しばらく使用して効果が現れない場合は、使用を中止してください。
6. 本品を改造しないでください。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
2. 有効期間  
3年

## 【保守・点検に関わる事項】

使用前の製品に異常が見られた場合は、使用せず、弊社の窓口までご連絡ください。お手入れの方法は洗濯絵表示にしたがってください。

## 【廃棄方法】

一般廃棄物として、市区町村の廃棄方法にしたがって処理してください。

## 【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売元：オンヨネ株式会社  
住所：新潟県長岡市高見町4327番地  
お問い合わせ先：0258-24-0048

## 【販売元】

販売元：セーレン株式会社  
住所：大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル14階  
商品に関するお問い合わせ先：06-4798-3081  
09：00～18：00（土日祝をのぞく）