

医療用品04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（71105001）

ヘルシークリカバリーウェア トップス

【禁忌・禁止】

以下の部位には使用しないでください。

(1) 感染部位

[血管拡張と血流増加が、炎症、かゆみ・かぶれを悪化させる恐れがあります。]

(2) 出血部位または出血の可能性がある部位

[血管拡張が出血の増大または出血を引き起こす恐れがあります。]

(3) その他医師が不適当と判断した部位

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



SIZE(cm)	S	M	L	LL	EL
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120

素材：ポリエステル（アースメディカルパウダー*を含む）

*アースメディカルパウダーは数種類の金属を含む微細粒子です。

2. 原理

ポリエステル繊維に含まれるアースメディカルパウダーが体熱の遠赤外線を輻射する。

【使用目的または効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行う。

【使用方法等】

衣服として直接肌に着用する。

日常活動時及び睡眠時のいずれも着用可能である。

本品は再使用可能である。

【使用上の注意】

1. 治療中の方や下記に該当する場合は、必ず医師または専門家と相談の上で使用ください。

(1) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方

(2) 糖尿病等による高度な末梢循環障害および知覚障害のある方

(3) 急性損傷や急性炎症が有る方

(4) 血栓性、静脈炎の疑いのある部位

(5) 悪性腫瘍のある部位またはその周辺

(6) 局所性刺激製剤を使用した部位

(7) 重度の浮腫が有る方

(8) 体温が38℃以上の方

(9) 血行促進作用のある薬を服用している場合

2. 他の治療器と同時に使用しないで下さい。

3. 使用中に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してください。

4. 患部に発疹、かゆみ、赤みなどが現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

5. しばらく使用して効果が現れない場合は、使用を中止してください。

6. 本品を改造しないでください。

【取り扱い上の注意】

1. 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の物と分けて洗濯してください。

2. 着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合があるので注意してください。

3. 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きすると、淡色部や他の物に色移りする場合があるので注意してください。

4. 洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。

5. アイロンはあて布を使用してください。

6. プリント部分にはアイロンをあてないでください。

【保管方法及び耐用期間】

1. 保管方法

直射日光と高温多湿を避けて保管してください。

2. 耐用期間

3年（この期間はあくまでも目安であり、ご使用状況によって異なります。）

【保守・点検に関わる事項】

使用前の製品に異常が見られた場合は、使用せず、弊社の窓口までご連絡ください。お手入れの方法は取扱表示にしたがってください。

【廃棄方法】

一般廃棄物として、市区町村の廃棄方法にしたがって処理してください。

【包装】

1 枚/袋

【製造販売業者の氏名又は名称】

オンヨネ株式会社

住所：新潟県長岡市高見町4327番地

お問い合わせ先：0258-24-0048

【販売業者】

株式会社ダイアナ

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

カスタマーセンター（ご相談窓口）

無料通話：0120-22-8866

受付時間：[月～金]9:30－19:30 [土]9:30－18:00

（日・祝・年末年始を除く）