
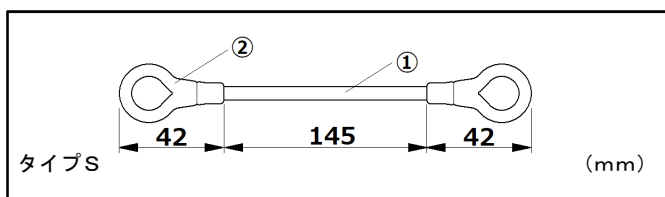


機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

とめばん

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

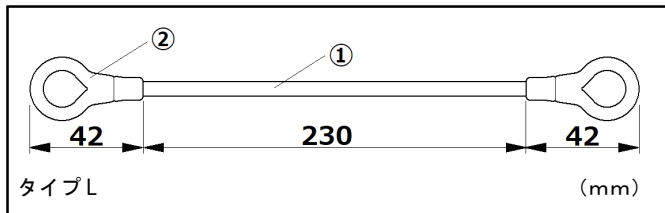

2. 種類

タイプ	本体質量
L	14 g
S	11 g

材質：銅、樹脂

3. 各部の機能


照番	名称	機能
①	ボディ	チューブ、コードを束ねる
②	リング	鉗子等で固定又は L字フック等で吊るす場合の孔

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリである。手術中に使用される機器のコードやチューブを束ねることにより、手術を円滑に進行するための器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

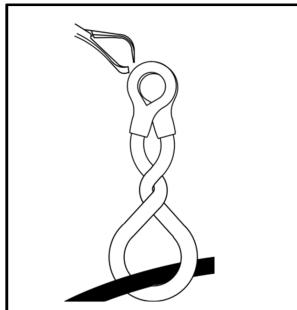

- (1) 本品の使用前に製品の破損が無い点検すること。製品が破損している場合は使用しないこと。
- (2) 本品は未滅菌品であるため、使用前に適切な方法で洗浄を行い、滅菌すること。
- (3) 束ねて固定したいコードやチューブをボディの中央に載せU字に折り曲げ、本品を複数回（2回以上）ひねりコードやチューブを束ねる。

- (4) リング部の孔にタオル鉗子等を掛けてドレープに固定するかリング部の孔にL字フック等を掛けて吊るす。
- (5) 使用後は、本品に破損などの異常がないか確認し、洗浄、滅菌を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 一般的事項

本製品は、未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、滅菌を行うこと。（洗浄、消毒、滅菌せずに使用すると患者や医療従事者が感染するおそれがあります。）

- (2) 患者の体位変更などにより本品の固定が外れないように注意すること。

- (3) 手術中に使用されるコード、チューブ以外の物には使用しないこと。

- (4) チューブに使用する場合は、本品を使用することによりチューブが閉塞しないようにすること。

- (5) 本品は生体非接触である。

- (6) 電気メスコードに使用する場合は、他のコードとまとめないこと。

2. 不具合・有害事象

- (1) 異物の付着

- (2) 破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、水濡れ、直射日光を避け保管すること。

2. 有効期間等

本品は、修理不可能な消耗品です。適切な使用前点検、使用、使用後の手入れ、貯蔵、保管を行った場合、本製品の耐用回数は、10回です（自社基準）。耐用回数以内であっても、異常が認められる場合は、廃棄交換して下さい。

【取扱い上の注意】

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守・点検事項

- (1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、血液、体液、組織、薬品などが付着した場合は、使用後直ちに洗浄し、消毒する。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
- (3) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、表面を損傷するので使用を避ける。
- (4) 滅菌は、135℃で8分間高圧蒸気滅菌することを推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

沖電線株式会社

長野県岡谷市長地御所 2-10-1