


器 49 医療用穿刺器 穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000

HP L-8 マンドレル

【形状・構造及び原理】

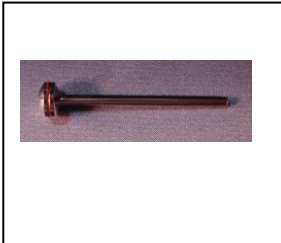

〔原材料〕：JIS G4303/G4804(クロムメッキ)

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

ディスク・ホイール・コーン・パフ等の円盤を挟んで切削研磨等に使用する。

〔効果〕

本品は、口腔内で歯面加工及び研磨、修復充填物また補綴物の加工及び研磨に使用するため、ディスク・ホイール・コーン・パフ等を確実にネジ止めできる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

本品にディスク・ホイール・コーン・パフ等を確実にネジ止めし、歯科治療用コントラハンドピースまたは歯科技工用エンジンに装着して使用する。

〔使用方法に関連する使用注意〕

- ① 本品を歯科治療用コントラハンドピースまたは歯科技工用エンジンハンドピースのチェック・ラッチ部に、マンドレルが正確に装着されているか確認して使用すること。***必ず引っ張って見て確かめること。**
使用に当たり必ず本品を使用すること。
- ② 本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ③ 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。
- ④ 本品の使用回転数は、10,000 r.p.m. 以下で使用する。
- ⑤ 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。

★★ 弊社推奨複合消毒法、

ステップ 1. (菌やウイルスの除去と一定のタンパク除去)

高濃度次亜塩素酸弱酸性水(フィリオ 30)にて、スプレークリーニング 1 分間放置 2 回洗い流水洗浄。

ステップ 2. (十分な洗浄とタンパク除去)

オキシドール系弱アルカリ洗浄剤(洗浄ルネサンス)にて 200 倍希釈、10 分浸漬後流水洗浄。

ステップ 3. 化学的殺菌・消毒剤(グルタール製剤)等を含む高水準消毒薬で浸漬洗浄・流水洗浄・拭き取り乾燥を行う。

- ⑥ 本品を洗浄清掃液中に浸漬すると柔軟性を損ないますので注意すること。またマンドレル等を強アルカリ・強酸性洗浄清掃液中に浸漬すると腐食することが予想されますので十分注意すること。

****なお、本品は構造上、高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)処理を絶対行わないこと。**

【使用の注意】

使用注意

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。
洗浄・滅菌は、[使用方法に関連する使用上の注意]ステップ 1～3&⑥を参照のこと。
- ③ 破折・曲がり等の原因になります必要以上の力(応力)を加えないこと。

***本品の品質上、洗浄浸漬薬液等に十分注意すること。**

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は適切な保管・管理をすること。

〔使用期限等〕

本品は、使用有効期限等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

マンドレルは使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

1 袋 10 本入り

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：小野島製作所 小野島 謙悟

電話番号：03-3986-5957

FAX 番号：03-3980-5147

製造業者：小野島製作所 小野島 謙悟

住所：〒170-0011

東京都豊島区池袋本町 3-19-12