


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

スーパーカラーポイント

【形状・構造及び原理】

① 形状、色調：

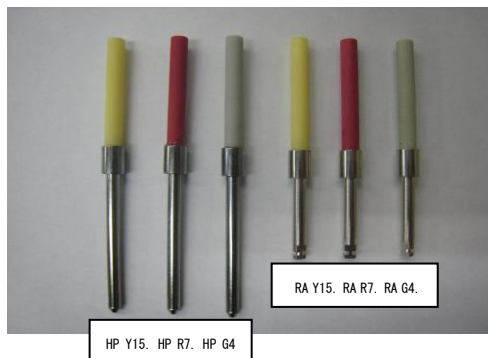

種類（粗さ）	軸形状	
Y15(イエロー)細研磨用	HP	RA
R7(レッド)微細研磨用	HP	RA
G4(グレー)超微細研磨用	HP	RA

②成 分、

- 1) 作業部(砥石部)：
酸化アルミニウム・エポキシ樹脂
- 2) 軸 部：JIS/G4303 鋼（クロムメッキ）

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

酸化アルミニウム・エポキシ樹脂を主成分とする研磨材で、補綴物等の研磨に用いる。

〔効能又は効果〕

本品は歯科用金属・ポーセレン・ジルコニア・ハイブリッド硬質レジンで製作された、補綴物裂溝部研磨に効果を発揮します。

【保守・点検に係る事項】

〔使用の確認〕

使用するにあたって、損傷・変形・傷・ヒビなど異常がなく回転時の軸振れがないことをチェックすること。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 本品は Y15/R7/G4 の順序で仕上げ研磨を行う。
2. 咬合面等の裂溝部研磨時には、本品の先端をドレッサー等で先細に形態修正し研磨を行う。
3. 使用回転数（5,000～13,000 回転）を超えた場合、破折しけがをする恐れがありますから、使用回転数範囲を超えないこと。

【使用上の注意】

1. 〔使用方法に関する使用注意〕
①本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し眼科医の診断を受けること。
2. 使用注意
①本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
②本品の研削、研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護めがねなどを使用すること。

③本品は【使用目的又は効果】の項及び説明書記載用途以外には使用しないこと。

④本品は、歯科用研磨器材の用途以外には使用しないこと。

⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 〔基本的使用注意〕

- ①歯科用駆動装置または歯科用技工回転機器に本品が確実に装着・保持されているか、引っ張るなどして確認してから使用すること。
- ②無理な角度、過度の加圧でのご使用は避けること。
- ③連続使用時には、発熱する事がありますので、その際は一旦冷やしてからご使用すること。
- ④本品は一部を接着剤により接合しているため、超音波洗浄は行わないこと。

3. 〔不具合・有害事象〕

有害事象

皮膚炎などの歯科金属疹（遅発生金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【貯蔵方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・出来るだけ高温多湿の場所を避けて保管すること。

〔有効期間・使用の期限〕

- ・通常の貯蔵方法であれば、長期保存による、品質変化は無いため、使用期限は定めない。

【包装】

	軸形状	種類（粗さ）	本数／函	
単品	HP	Y15(イエロー)	3 本	6 本
	RA	細研磨用	3 本	6 本
	HP	R7(レッド)	3 本	6 本
	RA	微細研磨用	3 本	6 本
	HP	G4(グレー)	3 本	6 本
	RA	超微細研磨用	3 本	6 本
セット	HP	アソート	3 本(各 1 本)	6 本(各 2 本)
	RA	(Y15/R7/G4)	3 本(各 1 本)	6 本(各 2 本)

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業：小野島製作所 小野島 謙悟

住 所：〒170-0011

東京都豊島区池袋本町 3-19-12

電 話 番 号：03-3986-5957

F A X 番号：03-3980-5147

製 造 業 者：小野島製作所 小野島 謙悟

住 所：〒170-0011

東京都豊島区池袋本町 3-19-12

【販売業者の名称及び住所等】

販 売 業 者：(株)日本歯科工業社

住 所：〒110-8530

東京都台東区上野 5-12-8

電 話 番 号：03-3836-2191

F A X 番号：03-3836-2199