

ミニフェルトコーン マンドレール付

【禁忌・禁止】

- ① 再使用禁止

【形状・構造及び原理】



[原材料]：羊毛

[原材料]：JIS G4303/G4804
(クロムメッキ)

【使用目的又は効果】

[使用目的]

補綴物等の研磨に用いる。

[効能又は効果]

本品のミニフェルトコーンを C A スクリューマンドレールにねじ込み、歯科用コントラハンドピースまたは歯科技工用エンジンに装着し回転させることによって、口腔内歯面艶出し及び修復充填物また補綴物の細部最終艶出し研磨等が容易に行う事を可能とした。

【使用方法等】

[使用方法]

歯科治療用コントラハンドピースまたは歯科技工用エンジンに装着して使用する。また必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

【使用上の注意】

1. [使用方法に関連する使用注意]

- ① 本品を歯科治療用コントラハンドピースまたは歯科技工用エンジンハンドピースのチャック・ラッチ部に、専用の C A スクリューマンドレールが正確に装着されているか確認して使用すること。使用に当たり必ず付属の C A スクリューマンドレールを使用すること。

必ず引っ張って見て確かめること。

- ② 本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
③ 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。
④ 本品の使用回転数は、10,000 r.p.m. 以下で使用する。
⑤ 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。

- ⑥ ミニフェルトコーンを洗浄清掃液中に浸漬すると柔軟性を損ないますので注意すること。またマンドレール等を強アルカリ・強酸性洗浄清掃液中に浸漬すると腐食することが予想されますので十分注意すること。

- ⑦ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。

- ⑧ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

*** * なお、付属の C A スクリューマンドレールは構造上、加熱滅菌器（オートクレーブ）を絶対使用しないこと。**

2. [基本的使用注意]

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
② 使用前に必ず（保守・点検に係る事項参照）をすること。
③ 使用目的（手術・処置・技工を含む医療行為）以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

本品の品質上、洗浄浸漬薬液等に十分注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
② 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

[使用期間等]

- ① 本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

- ① 専用 C A スクリューマンドレールは使用（滅菌）前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

- Aタイプ：ミニフェルトコーン：10個入
C A スクリューマンドレール：1本入
○ Bタイプ：ミニフェルトコーン：20個入
C A スクリューマンドレール：2本入

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：小野島製作所 小野島 謙悟
住 所：〒170-0011
東京都豊島区池袋本町3-19-12
電 話 番 号：03-3986-5957
F A X 番 号：03-3980-5147
製 造 業 者：小野島製作所 小野島 謙悟
住 所：〒170-0011
東京都豊島区池袋本町3-19-12

【販売業者の名称及び住所等】

販 売 業 者：株式会社 日本歯科工業社
住 所：〒110-8530
東京都台東区上野5-12-8

取扱説明書等を必ずご参照ください。