


器具器械 42
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000

インレーリムーバー S 型

【形状・構造及び原理】

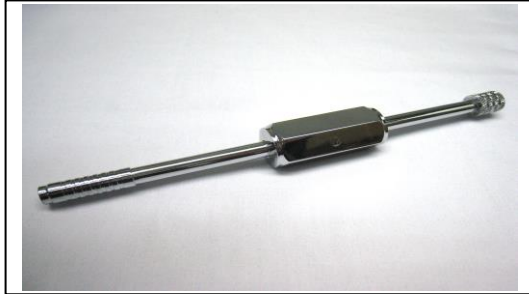

〔原材料〕：黄銅

【使用目的又は効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具を言う。

【使用方法等】

本品はチップを接続し使用する。

【使用上の注意】

1. [使用方法に関連する使用上の注意]

- ① 本品は長期間使用により、鋼材の疲労・磨耗等で耐久性の低下が生じますので適時交換すること。
- ② 本品を絶対に細工加工しないこと。事故・破損等の原因になります。
- ③ 本品は黄銅製です。一般歯科用の消毒は可能ですがただし、長時間薬液・水中に浸漬させないこと。尚、オートクレーブ・ケミクレーブの使用は可能です。また、次の薬液消毒剤は金属腐食を起こす恐れがありますので使用しないこと。超酸性水・次亜塩素酸ナトリウム・塩化ベンザルコニウム・ポビドンヨード・ホルマリン・フェノール・グルコン酸クロルヘキシジン・止血剤・フッ化ジアミンミン酸等。
- ④ 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、器具を変色・腐食させる恐れがありますので使用を避けること。
また、金属タワシ・クレンザー（磨き粉等）は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- ⑤ 本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。サビの発生・破折・性能・品質等の低下となります。
- ⑥ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。
- ⑦ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. [基本的使用注意]

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。洗浄・滅菌については上記③④⑤を参照のこと。
- ③ 使用目的（手術・処置・技工を含む医療行為）以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ④ 使用後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに拭取り洗浄液等に浸漬すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

〔使用期間等〕

- ① 本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することが有るため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用（滅菌）前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

- インレーリムーバー S 型：1 個入。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：小野島製作所 小野島 謙悟
住 所：〒170-0011
東京都豊島区池袋本町 3-19-12
電 話 番 号：03-3986-5957
F A X 番 号：03-3980-5147
製 造 業 者：小野島製作所 小野島 謙悟
住 所：〒170-0011
東京都豊島区池袋本町 3-19-12

【販売業者の名称及び住所等】

販 売 業 者：株式会社 日本歯科工業社
住 所：〒110-8530
東京都台東区上野 5-12-8

取扱説明書等を必ずご参照ください。