

再使用禁止

CSM コネクター

【警告】


使用方法

カテーテルの引戻し・押込みを何回も繰り返すとニードルレスキャップの上面からジェルが漏れる場合がありますので、引戻し時には注意すること。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造等及び原理等】

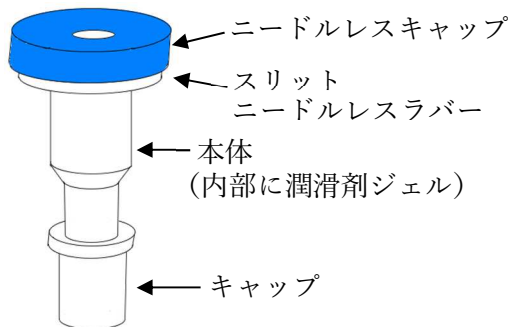

原理

本体内部にグリセリン潤滑剤を充填しており、内視鏡の鉗子口に接続して、カテーテル等を通すとカテーテル等に潤滑剤が塗布される。

【使用目的又は効果】

鉗子口から挿入する器具が本品内を通過することで潤滑剤が塗布されるので、事前に手で潤滑剤を塗布する手間を省くことが出来る。

【使用方法等】

1. 本品底面のキャップを外す
2. 本品を鉗子口口に差込む。
3. ニードルレスキャップの中心からカテーテル等をゆっくり差込む
4. 使用後カテーテルを引抜いた後、本品を外し本品を廃棄する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品を接続する前には次のことを確認・注意すること。
 - 本品を取り出す前に袋が破れていないこと。
 - ニードルレスキャップの天面の穴には指等で触れないこと。
 - 底面キャップを外すとき、青色のニードルレスキャップを持って、底面に触れることの無いように底面キャップを引抜くこと。
 - 底面キャップを外したら直ぐに鉗子坑口に差込むこと。
2. 本品の使用中は次の事項に注意すること。
 - 本品が、接続している鉗子口から抜けかかっているか確認すること。
 - カテーテルの引戻しを繰り返す場合にはニードルレスキャップの上面からジェルの漏れがないか確認すること。漏れが発生した場合は本品を交換してください。
3. 使用後は廃棄する。
 - 一度取り外したものを再度接続してはいけない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 火気、水ぬれに注意して、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
2. 使用期限
製品の包装に表示されている年月の月末日まで（自己認証による）。

【包装】

最小包装単位 個数は 1 個
50 個/内箱 200 個(4 内箱)/外箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ORT メディカル株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-19
竹生第2ビル9階
電話：045-534-7015 Fax：045-534-7760

製造業者：四川省广元市康康医療器械有限公司
(中華人民共和国)