

機械器具（29）電気手術器
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

Paradise 接続ケーブル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成、各部の名称

本品は別品目である「販売名：Paradise システム」のジェネレーターとカテーテルを接続するためのケーブルである。両端のコネクターは同形状である。



ケーブルの長さ：約 3 m

【使用目的又は効果】

本品は別品目である「販売名：Paradise システム」のジェネレーターとカテーテルを電氣的に接続するためのケーブルである。

【使用方法等】

組み合わせて使用する医療機器

本品は「販売名：Paradise システム」（承認番号：30700BZX00199000）と併用して使用する。

使用方法

- (1) 別品目「Paradise システム」の添付文書及び取扱説明書に従い、ジェネレーター及びカテーテルを準備する。
- (2) 無菌操作により、滅菌済みの本品の包装を開き、清潔野に置く（本品の両端のコネクターは同形状であり、どちら側でも接続できる）。
- (3) ジェネレーター正面に本品を接続する。
- (4) カテーテルに本品を接続する。
- (5) 別品目「Paradise システム」の添付文書及び取扱説明書に従い使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本品をジェネレーターに脱着する際等、本品の操作をする際は慎重に行い、過度な力を加えないこと〔本品や「Paradise システム」を破損させるおそれがある〕。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- (1) 「Paradise システム」の操作は、「Paradise システム」の添付文書に従い、関連学会の定める適正使用指針を満たす医師及び施設で使用する。
- (2) 本品以外のケーブル等を使用すると、「Paradise システム」の電磁放射の増加や電磁感受性の低下が生じるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件
直射日光を避け涼しく乾燥した場所で保管。
2. 有効期間・使用期限
 - (1) 有効期間：2 年
 - (2) 使用期限：製品の包装に表示されている。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

 Otsuka 大塚メディカルデバイス株式会社

問い合わせ窓口／電話番号：03-6717-1458

外国製造業者：ReCor Medical, Inc.（米国）

提携：

 Otsuka 大塚製薬株式会社